



**SIEMPRE** instale este asidero en la superficie de montaje con los elementos de sujeción adecuados para el asidero, tipo de superficie y carga correspondientes.



**SIEMPRE** lea las instrucciones de instalación del producto antes de instalarlo.

**SIEMPRE** lea las instrucciones de instalación y cuidado para el usuario final.



**SIEMPRE** haga coincidir los elementos de sujeción con los agujeros que hay en el asidero.

**SIEMPRE** recurra a un profesional con experiencia para la instalación de la tabla de bañera.



**NUNCA** instale los elementos de sujeción avellanados en agujeros de sujeción sin avellanamiento.

**NUNCA** añada avellanamiento en ningún agujero del asidero.

**NUNCA** agrande los agujeros de sujeción.



**CAUIDADO** si agranda los agujeros de sujeción reducirá la resistencia del asidero, invalidando la garantía y la capacidad de carga indicada.



**NO** ponga cerillas o cigarrillos encima del producto, ni cerca de él.




**AKW** MediCare


E

## Asideros de Metal

### Instrucciones de instalación y cuidado para el usuario

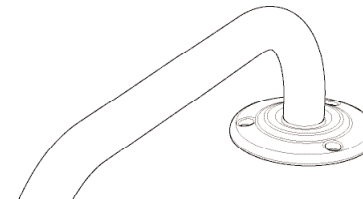


**Reborde Soldado,  
Serie 1100**

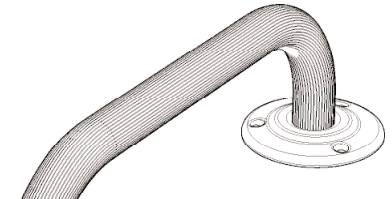

**Reborde atornillado,  
Serie 1300**



**Extremo Plano de Acero,  
Serie 1000  
Acero Inoxidable, Serie 1200**

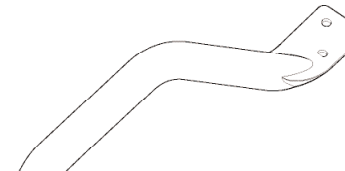

**Con Manivela,  
Serie 1750**



**Newel  
Serie 1740**

Color: Blanco RAL 9016 / Marrón RAL 8015

Para uso interior y exterior

Patentes en trámite de los diseños registrados

**Para más detalles sobre este y otros productos AKW por favor póngase en contacto con su distribuidor - vea los detalles en el embalaje exterior**

**Instalador: Asegúrese de que el usuario final de este producto disponga de esta información.**

## Instrucciones de instalación

### AKW MediCare recomienda que siga estas instrucciones al instalar el Asidero AKW:

Los Asideros de Acero Dulce se recomiendan para todas las aplicaciones de interior excepto para los cuartos de baño y de ducha.

La instalación del asidero de metal en un cuarto de baño o de ducha puede requerir la conexión de una toma de tierra en cumplimiento de lo dispuesto en las Normas sobre Cableado IEE sobre componentes metálicos en cuartos de baño.

Todos los Asideros de AKW MediCare son diseñados y probados según la norma BS EN 12182.

Las recomendaciones indicadas más arriba tienen como finalidad una vida óptima del producto.

Los asideros se pueden instalar en otros lugares, en detrimento de la vida óptima del producto.

Consulte a un fabricante de elementos de sujeción indicando el tipo y construcción de la superficie, así como la versión del asidero, si no está seguro del tipo elemento de sujeción a utilizar.

AKW MediCare no puede especificar el tipo de elemento de sujeción a utilizar debido al gran número de tipos y condiciones de superficie en las que se pueden instalar el asidero.

### Notas de instalación y dimensiones del Asidero de Metal AKW

**Este producto ha sido diseñado para su instalación en un único lugar.**

#### Carga máxima intermitente central:

Series 1100 y 1300                      150 kg

Series 1000 y 2000                      125 kg

Series 1740 y 1750                      125 kg

\*La Capacidad de Peso se refiere exclusivamente a la barra del asidero, no a los accesorios de sujeción o retención en la superficie de instalación

Rango de temperatura  
normal de funcionamiento:            -5°C hasta +35°C

#### Materiales de Construcción:

Asideros y rebordes:                      Acero dulce o acero inoxidable 304,  
según el modelo del asidero.

Acabado:                                      Recubrimiento de polvo de resina epóxica de poliéster,  
en cumplimiento de la prueba de rocío de sal de 96 horas  
ASTM B117-87 96.

## Instrucciones de cuidado para el usuario

Los asideros de metal AKW MediCare facilitan la movilidad del usuario y han sido diseñados para uso general doméstico.

Han sido concebidos para mejorar el agarre o la sujeción cerca de las puertas, escaleras, duchas, baños etc...

Se recomienda el uso de los Asideros de Acero Dulce en todas las aplicaciones de interior excepto en cuartos de baño y de ducha.

Se recomienda el uso de los Asideros de Acero Dulce en todas las aplicaciones, tanto de interior como de exterior.

Si se instala el asidero de metal en un cuarto de baño o de ducha, puede ser necesario dotar al asidero de metal de una toma de tierra en cumplimiento con las Normas sobre Cableado IEE para componentes metálicos en cuartos de baño.

El asidero sólo debe utilizarse para su función específica. No ate ni cuelgue objetos de él, de lo contrario puede afectar muy negativamente a su utilidad y seguridad

El asidero debe ser inspeccionado como parte del programa de mantenimiento, y los que tengan indicios de daño o uso indebido deberán ser sustituidos.

### Limpieza del Asidero AKW

Este producto debe ser limpiado periódicamente empleando productos domésticos para la limpieza del baño.

Después de la limpieza, enjuáguelo siempre con agua y frótelo a fondo con un paño húmedo con el fin de eliminar los restos del producto de limpieza antes de secarlo.

**No utilice** materiales de limpieza fuertes o concentrados de naturaleza ácida, alcalina o de otros tipos, pues pueden decolorar o dañar el producto.

### Desinfección

Cuando sea necesario desinfectar, se deberán seguir los procedimientos habituales recomendados con respecto al uso del material de desinfección, teniendo especial cuidado de respetar los avisos que se indican más abajo sobre los posibles efectos de los productos químicos agresivos sobre los plásticos.

### Embalaje

El asidero se suministra en una bolsa de polipropileno (PP) con el objeto de mantenerlo limpio hasta el momento de su instalación; también puede suministrarse en grandes cantidades en caja de cartón. Ambos tipos de embalaje son adecuados para el reciclaje, debiéndose deshacerse de ello en cumplimiento de las normas locales