



**Ayudas Dinámicas**

**MANUAL DE USUARIO  
PARASOL "PROF" H8755**



## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMACIÓN</b>	<b>4</b>
<b>3. CONSEJOS DE USO/ADVERTENCIAS</b>	<b>5</b>
<b>4. MONTAJE / ENSAMBLAJE</b>	<b>6</b>
<b>5. FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7</b>
<b>6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>8</b>
<b>8. GARANTÍA</b>	<b>9</b>

## **1. INTRODUCCIÓN**

Gracias y enhorabuena por adquirir su nuevo Parasol "Prof" de Ayudas Dinámicas®.

Nos complace proporcionarle productos seguros y confortables. Nuestro objetivo es asegurar su completa satisfacción. Esperamos sinceramente que disfruten de su Parasol "Prof" de Ayudas Dinámicas®.

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar su Parasol "Prof".

Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados del Parasol "Prof".

Si tiene alguna consulta o precisa de información adicional, contacte con su distribuidor.

## 2. INFORMACIÓN

El parasol "Prof" ofrece una protección óptima frente a la lluvia y el sol mientras que el caminador se puede conducir con ambas manos. Aplicable a todos los caminadores de 4 ruedas, también para sillas de ruedas. "Caminador de la foto no incluido."

Resistente al viento. Altura graduable. Montado en un mango que se inclina y se ajusta solo apretando un botón. Viene preparado para montarse en tubo de 22 mm y se suministra con anclajes para tubos de diferentes diámetros: 18, 20 y 25 mm. También se puede instalar en sillas de ruedas.

Estos símbolos pueden aparecer en su manual y producto Parasol "Prof". Asegúrese de que los ha leído y comprendido perfectamente.



**¡ADVERTENCIA!** Indica una situación o circunstancia potencialmente peligrosa. De no seguir los procedimientos indicados, podría provocar en usted o en terceros lesiones físicas y daños o averías en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo negro en un triángulo amarillo con borde negro.



**¡OBLIGATORIO!** Pasos que deben realizarse tal y como se indica. De no realizar las acciones obligatorias, podría sufrir lesiones personales o daños en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo blanco sobre un círculo azul con borde blanco.



**¡PROHIBIDO!** Estas acciones están prohibidas, cualquiera que sea el tiempo o las circunstancias. La realización de acciones prohibidas puede provocar lesiones personales o daños en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo negro con un círculo y raya rojos.

**NOTA:** *El presente manual de instrucciones recoge las últimas especificaciones e informaciones disponibles en el momento de su publicación. El fabricante se reserva el derecho a aportar modificaciones en caso necesario. Cualquier modificación en nuestros productos puede provocar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones de esta guía y el producto que ha comprado.*

### 3. CONSEJOS DE USO/ADVERTENCIAS

Los siguientes símbolos identifican los peligros, acciones obligatorias y acciones prohibidas del producto. Es muy importante que usted lea y entienda todos los símbolos.



**¡ADVERTENCIA!** Por favor, revise los tornillos antes de usar el parasol. Por favor tenga en cuenta que el parasol no afecta a los frenos del andador/caminador.



**¡ADVERTENCIA!** Antes del primer uso bajo lluvia y con obstáculos, por favor, primero familiarícese con el mecanismo del parasol.



**¡ADVERTENCIA!** Al activar la apertura del parasol, por favor mantenga una distancia prudencial respecto del mismo al cuerpo y hacia otras personas para evitar lesiones.



**¡ADVERTENCIA!** Al cerrar el parasol caminador tenga cuidado de no dañarse los dedos de la mano.



**¡ADVERTENCIA!** En el estado cerrado, por favor revise que la correa de sujeción está bien sujeta.



**¡ADVERTENCIA!** Después de aparcarse el caminador, por favor siempre cierre el parasol, gire el parasol y cierre el gancho de cinturón de sujeción.



**¡ADVERTENCIA!** Durante el uso del parasol caminador en medio de obstáculos y personas, por favor vaya con cuidado con campo libre de visión. No limite a otros usuarios de la carretera.



**¡ADVERTENCIA!** Recomendamos cerrar el parasol si hay mucho viento.




**¡ADVERTENCIA!** El parasol caminador no está destinado para transportar y mover el caminador.

#### 4. MONTAJE / ENSAMBLAJE

##### CONTENIDO

1. Parasol.
2. Émbolo de fijación, pre ensamblado de Ø22mm.
3. Manguitos de fijación para tubo de Ø18/20/25mm.
4. Set de tornillos M6x45mm.
5. Set de tornillos M6x75mm.
6. Llave Allen.

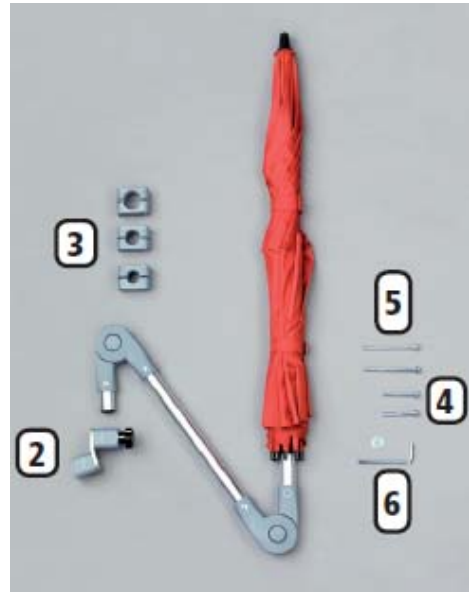

ig. 1

##### MONTAJE

El émbolo de fijación del parasol ya está pre-montado para la fijación un chasis con tubo de 22mm. (Fig. 2).

Por favor, montar el émbolo de fijación con la ayuda de la llave Allen. (Fig. 3).

Para la fijación del tubo redondo de 18/20/25mm cambie los manguitos de fijación necesarios.

Para la fijación en el tubo oval, por favor escoja el conjunto adecuado de manguitos de fijación. (Fig. 4 + 5).

Por favor, sitúe la barra de aluminio del parasol en el manguito de fijación y ajuste el cierre alrededor. El parasol está montado y puede ser abierto fácilmente con un mecanismo de presión. (Fig. 6 + 7).



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7

## 5. FUNCIONAMIENTO

Para desplegar el parasol caminador, por favor suelte la correa de sujeción (1) y active la apertura automática con el botón (2). Atención, el parasol se abrirá.

A través del mecanismo de presión de la bisagra sólida (3) usted puede poner el parasol en diferentes posiciones.

Otro posicionamiento es posible si suelta la sujeción inferior (4) y modifica el ajuste. Vuelva a apretar el ajuste posteriormente.

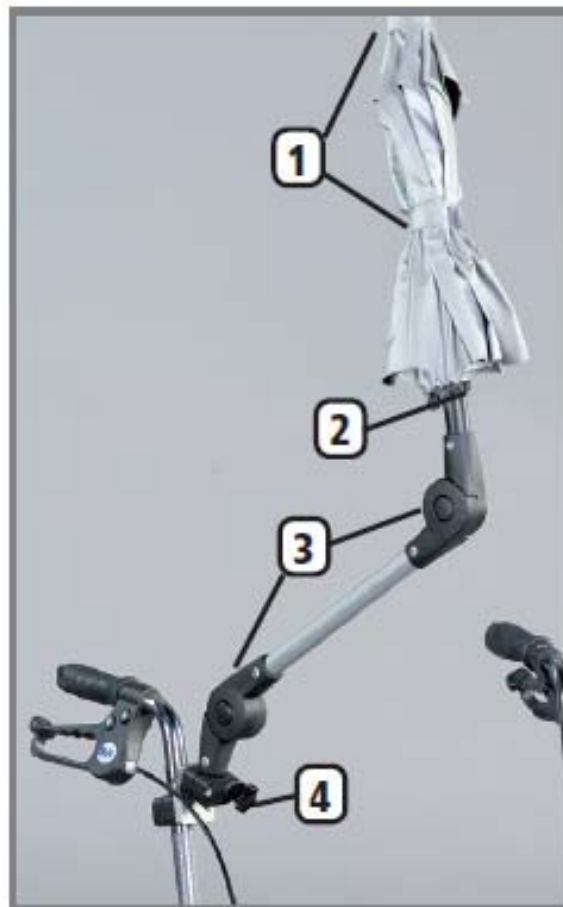

**Fig. 8**

## 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Diámetro parasol	Altura	Peso
H8755	105cm	Graduable	1Kg

Altura graduable. Montado en un mango que se inclina y se ajusta solo apretando un botón. Viene preparado para montarse en tubo de 22 mm y se suministra con anclajes para tubos de diferentes diámetros: 18, 20 y 25 mm. También se puede instalar en sillas de ruedas. El caminador no está incluido.





## **8. GARANTÍA**

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Si no sigue las instrucciones, advertencias y notas del manual de utilización, podría ocasionar lesiones físicas a usted o a terceros o daños en el producto, además de anular la garantía del mismo.

PARASOL "PROF" H8755



Importado por:  
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.  
C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75  
[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)  
[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

