



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO RAMPAS PLEGABLE / DE UNA PIEZA / TELESCÓPICA



RAMPAS PLEGABLES /
RAMPAS DE UNA PIEZA / RAMPA TELESCÓPICA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. INFORMACIÓN	3
3. CONSEJOS DE USO/ADVERTENCIAS	4
4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO	5
5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6
6. SERVICIO Y VIDA ÚTIL	7
7. ESPEFICICACIONES	8
8. GARANTÍA	9

1. INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por adquirir su nueva rampa de Ayudas Dinámicas®.

Nos complace proporcionarle productos seguros y fáciles de usar. Nuestro objetivo es asegurar su completa satisfacción. Esperamos sinceramente que disfruten de su rampa de Ayudas Dinámicas®.

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar la rampa.

Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados de la rampa.

Si tiene alguna consulta o precisa de información adicional, contacte con su distribuidor.

2. INFORMACIÓN

La rampa ha sido desarrollada para superar escalones u otros obstáculos con scooters, sillas eléctricas o manuales, carretillas u otros productos similares.

Estos símbolos pueden aparecer en su rampa y sirven para identificar advertencias, acciones obligatorias o prohibidas. Asegúrese de que los ha leído y comprendido perfectamente.



¡ADVERTENCIA! Indica una situación o circunstancia potencialmente peligrosa. De no seguir los procedimientos indicados, podría provocar en usted o en terceros lesiones físicas y daños o averías en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo negro en un triángulo amarillo con borde negro.



¡OBLIGATORIO! Pasos que deben realizarse tal y como se indica. De no realizar las acciones obligatorias, podría sufrir lesiones o daños en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo blanco sobre un círculo azul con borde blanco.

¡PROHIBIDO! Estas acciones están prohibidas, cualquiera que sea el tiempo o las circunstancias. La realización de acciones prohibidas puede provocar lesiones personales o daños en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo negro con un círculo y raya rojos.

NOTA: *El presente manual de instrucciones recoge las últimas especificaciones e informaciones disponibles en el momento de su publicación. El fabricante se reserva el derecho a aportar modificaciones en caso necesario. Cualquier modificación en nuestros productos puede provocar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones de esta guía y el producto que ha comprado.*

3. CONSEJOS DE USO/ADVERTENCIAS



¡OBLIGATORIO! Antes de utilizar el producto, lea y siga las instrucciones del manual de usuario.



¡PROHIBIDO! No supere el ángulo de inclinación máximo recomendado por el fabricante de un dispositivo de movilidad con éste ocupado.



¡OBLIGATORIO! No supere el peso máximo soportado de la rampa. Al utilizar la rampa, distribuya el peso de manera uniforme por la superficie.



¡ADVERTENCIA! Si la superficie está mojada, la rampa puede volverse resbaladiza. Mantenga la rampa seca y sin objetos extraños que puedan impedir el manejo seguro de la silla/vehículo u otro aparato de movilidad. En condiciones climatológicas adversas, sea muy prudente al utilizar la rampa.



¡ADVERTENCIA! Cuidado con los puntos de pinzamiento en las bisagras de las rampas plegables. Evite tocar con los dedos estas bisagras al extender o plegar una rampa.



¡ADVERTENCIA! Las rampas son pesadas. Consulte el cuadro de especificaciones para conocer el peso de la rampa. Levantar objetos muy pesados puede provocar lesiones físicas. En caso necesario, solicite la ayuda de alguien físicamente capaz para manipular la rampa.



¡ADVERTENCIA! No realice ningún cambio en la rampa si no ha sido autorizado por su distribuidor. Las modificaciones no autorizadas anulan la garantía y pueden causar lesiones.



¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que la rampa esté colocada correctamente sobre una superficie llana y horizontal. La parte inferior de la rampa debe descansar firmemente sobre el suelo y la parte superior debe colocarse a nivel del escalón o del borde vertical.





¡ADVERTENCIA! No deje que los niños jueguen sobre la rampa o cerca de ella.




¡ADVERTENCIA! Colóquese siempre a un lado de la rampa al subir o bajar un vehículo de movilidad. Nunca se coloque detrás del vehículo para subir o bajar una rampa.

RAMPAS PLEGABLES /
RAMPAS DE UNA PIEZA / RAMPA TELESCÓPICA


 ¡ADVERTENCIA! No utilice la rampa a modo de puente para sortear desniveles de terreno. La rampa ha sido diseñada para subir o bajar escalones u otras pendientes similares.

 ¡ADVERTENCIA! Se recomienda inspeccionar la rampa regularmente para descartar cualquier daño o pérdida de piezas. Póngase en contacto con su proveedor autorizado para reparaciones o recambios.

 ¡ADVERTENCIA! Consulte las especificaciones de funcionamiento de su vehículo de movilidad y respete los ángulos de inclinación máxima recomendados para el vehículo ocupado.

 ¡ADVERTENCIA! Cuidado de no atraparse los dedos al cerrar la rampa.

 ¡ADVERTENCIA! Si une la rampa a un vehículo, ésta deberá estar fijada al vehículo.

 ¡ADVERTENCIA! No golpee la rampa.


4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO

Coloque la rampa correctamente antes de su uso.


Vea las imágenes para su correcta colocación.

Posición superior:

Uso incorrecto

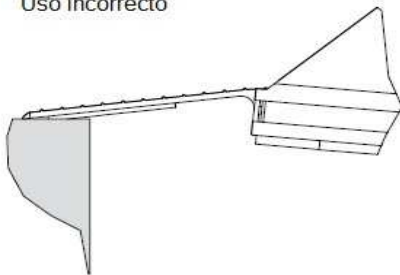


Uso correcto

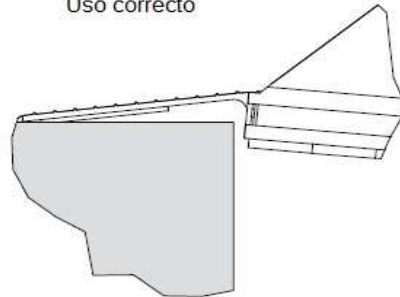


Posición inferior:

Uso incorrecto

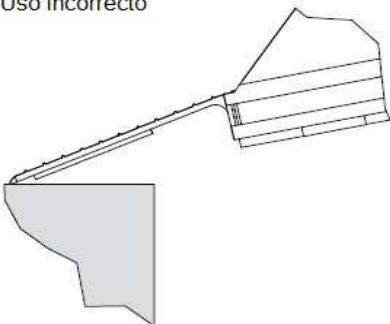

Uso correcto

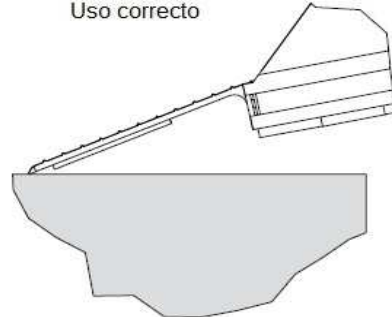

RAMPAS PLEGABLES / RAMPAS DE UNA PIEZA / RAMPA TELESCÓPICA

Las rampas deben ser posicionadas sobre una superficie firme de tal manera que la superficie de contacto de la rampa quede bien apoyada.

RAMPA PLEGABLE, TELESCÓPICA Y DE UNA PIEZA

Cuando junte los dos railes de las rampas, tenga cuidado de que ambos estén paralelos y a la misma altura. La distancia entre railes debe corresponderse con la anchura de vía de la silla de ruedas/vehículo. A continuación, sólo en la telescópica, extienda los tramos de ambos railes hasta la longitud deseada.

RAMPA DE UNA PIEZA DE PLATAFORMA ANCHA

En esta rampa no será necesario hacer nada de lo mencionado en las rampas anteriores, solamente que el ancho de vía de la silla/vehículo se corresponda con el ancho total de la rampa.

¡IMPORTANTE!

No ponga en marcha sillas de ruedas eléctricas, scooters, estando encima de la rampa ya que las distintas partes móviles de la rampa se podrían mover. En el caso de usar una silla de ruedas parada en medio de la rampa, poner marcha atrás y empezar de nuevo a subir desde abajo.

5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

La rampa debe ser transportada por el asa(s).

VERIFICACIÓN VISUAL DE LA RAMPA

Si el embalaje está dañado en el momento de recibir su rampa, inspeccione la rampa cuidadosamente por si detecta deficiencias visibles, defectos o fallos. Si está dañada, la rampa no debe ser utilizada antes de que lo autorice su distribuidor.

LIMPIEZA DE LAS RAMPAS

Limpie las rampas con un paño húmedo, esponja o cepillo suave aplicado con un agente de limpieza normal.

Las rampas también se pueden enjuagar bajo el chorro de agua de mangueras o similares.

No use productos químicos.

CÓMO PREVENIR / EVITAR LA CORROSIÓN

La rampa está hecha de materiales resistentes a la corrosión por tanto no requiere mayor prevención contra la corrosión.

¿QUÉ MANTENIMIENTO ES REQUERIDO POR EL PROPIETARIO?

Las bisagras de las rampas plegables deben ser lubricadas cada seis meses, o según se requiera.

RAMPAS PLEGABLES / RAMPAS DE UNA PIEZA / RAMPA TELESCÓPICA

Los raíles de deslizamiento de las rampas telescópicas deben secarse con un paño seco cuando sea necesario.

Si las rampas están resbaladizas (cubiertas de hielo, por ejemplo), ponga sal en la rampa (NUNCA grava).

El sistema telescópico no debe ser desmontado por el usuario. Si el sistema telescópico de la rampa telescópica está desmontado, deberá ser montado por personal cualificado.

6. SERVICIO Y VIDA ÚTIL

VIDA ÚTIL Y MANTENIMIENTO DE LA RAMPA

Teniendo en cuenta el mantenimiento prescrito anteriormente, las rampas pueden tener una vida útil muy larga.

INSPECCIÓN DE RAMPAS

Las partes que están rotas o defectuosas deben ser reemplazadas por nuevas piezas de recambio.

1. Control visual de la rampa.

- Compruebe la rampa para observar el desgaste.

- Compruebe la rampa si tiene fallos.

- Compruebe que no hay daños en la rampa.

2. Prueba de la rampa.

- Compruebe todas las funciones de la rampa, cargada y descargada.

3. Control del estado mecánico de la rampa.

- Limpie la suciedad y otras impurezas de la rampa.

- Revise las piezas vitales de la rampa.

- Cambie las piezas de la rampa que presenten defectos o estén gastadas.

4. Pase por el punto 2 de nuevo para volver a comprobar.

5. ¿Surgió algún problema en el punto 4?

- Si nuevos problemas surgieron, vuelva al punto 3.

- Si no hay problemas nuevos, la inspección ha concluido.

RAMPAS PLEGABLES /
RAMPAS DE UNA PIEZA / RAMPA TELESCÓPICA

7. ESPECIFICACIONES

Modelo	RD1100	RD1500	RD2000	RF1200	RS90	RT1500	RT2000	RT3000
Descripción	Plegables 2 railes	Plegables 2 railes	Plegables 2 railes	1 Pieza 2 railes	1 Pieza plataforma	Telescópicas 2 railes	Telescópicas 2 railes	Telescópicas 2 railes
Longitud	1,1m	1,5m	2m	1,2m	90cm	1,5 m	2m	3m
Longitud plegada	55cm	75cm	1m	1 pieza	Plataforma	98 cm	1'28 m	1,16m
Ancho útil por carril	21cm	21cm	21cm	21cm	72cm	25 cm	25 cm	18cm
Peso total	3,6kg	4,5kg	5,9kg	3,1kg	8kg	5,5 kg	7,2 kg	8,2kg
Peso máximo de carga	400kg	400kg	400kg	400kg	272kg	270kg	270kg	360kg

8. GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según ley vigente de garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Si no sigue las instrucciones, advertencias y notas del manual de utilización y aquellas situadas en su rampa, podría ocasionar lesiones físicas a usted o a terceros o daños en el producto, además de anular la garantía del mismo.

RAMPAS PLEGABLES /
RAMPAS DE UNA PIEZA / RAMPA TELESCÓPICA



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

