



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO - SG7 MYSTERE



INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	5
3. CONTROLES Y PANEL DE CONTROL.....	6
4. AJUSTE DEL ASIENTO.....	8
5. FUNCIONAMIENTO.....	9
6. ENSAMBLADO.....	10
7. CARGA DE LA BATERÍA.....	12
8. MANTENIMIENTO.....	13
9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	14
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	15
11. CONSEJOS DE CONDUCCIÓN SEGURA.....	15
12. DIRECTRICES PARA LA SEGURIDAD.....	17
13. CONDUCIR EL VEHÍCULO POR CARRETERA.....	18
14. GARANTÍA.....	19

1. INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por adquirir su nuevo scooter para la movilidad de Adasmobility®.

Nos complace proporcionarle productos seguros y confortables. Nuestro objetivo es asegurar su completa satisfacción. Esperamos sinceramente que disfruten de su scooter para la movilidad de Adasmobility®.

Por favor, lea detenidamente las advertencias e instrucciones proporcionadas en este Manual de usuario antes de manejar las diversas funciones de este scooter.

Este manual incluye instrucciones sobre el funcionamiento para cada aspecto del scooter, instrucciones de montaje/ensamblaje, como también una guía y consejos para un uso seguro.

Este manual está escrito únicamente para su Mystere.

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A lo largo de este Manual de usuario, encontrará una serie de símbolos que le llaman la atención sobre aspectos importantes o sobre situaciones de riesgo. Le recomendamos tenerlos en cuenta.



¡PELIGRO!: Riesgo de accidentes graves, lesiones o daños al producto.



INFORMACIÓN IMPORTANTE: Datos a tener en cuenta



No utilice su Mystere sin primero haber leído por completo este Manual de usuario.
 No exceda la pendiente máxima de 12°.
 No lleve pasajeros o exceda el peso máximo de carga (ver “Especificaciones técnicas”).
 No suba o baje de su Mystere a menos que esté apagado.
 No encienda su Mystere con la palanca de retroceder / avanzar presionada.
 No realice giros bruscos a velocidad máxima, especialmente en terrenos irregulares o accidentados.
 Del incumplimiento de esto puede resultar la caída del scooter.
 No acelere cuando esté atravesando curvas. Siempre aproxímese a las curvas a baja velocidad y en línea recta.
 Deténgase siempre por completo antes de cambiar de dirección. Ya sea hacia adelante o hacia atrás.
 No se siente en su Mystere si se encuentra en un vehículo en movimiento. Siempre asegure el scooter para que no se pueda mover dentro del vehículo y trasládese a un asiento del vehículo.
 No conduzca su Mystere por aguas profundas o lo limpie con una manguera de alta presión.
 Nunca intente bajar por una pendiente con el motor apagado ya que se perderá todo el poder de frenado.
 Se proporciona un cinturón de seguridad para su seguridad y se le aconseja utilizarlo en todo momento.

Uso previsto

El Mystere está diseñado para ser utilizado en exteriores en pendientes de hasta 12°. Es adecuado para ser utilizado sobre terreno irregular y podrá manejar obstáculos de hasta 80 mm de altura, pero se debe tener cuidado en estas condiciones.

Uso en la acera

La velocidad del Mystere depende del peso del ocupante, la inclinación y el tipo de superficie. Probado con un peso de 114.55 kg el Mystere dió una velocidad de 12-13 km/h sobre suelo plano, en la configuración de alta velocidad.

Preparación del Mystere para su primer uso

Si recibe su Mystere empaquetado y necesita ser ensamblado vea la sección “Ensamblado”. Las baterías requerirán ser cargadas. Consulte el apartado de “Carga de la batería” para más detalles.



IMPORTANTE

El Mystere es fácil de conducir pero es esencial que se familiarice con los controles y aprenda a conducirlo en un área segura con suficiente espacio para maniobrar por su propia seguridad y la de otros. El área debe estar libre de obstáculos y ser razonablemente plana. Marque un campo de prácticas para la conducción en línea recta, para girar en espacios reducidos, conducir en marcha atrás y para rodear obstáculos.

3. CONTROLES Y PANEL DE CONTROL

A continuación se detallan los diversos controles y sus usos.

Palancas de control de velocidad

Palanca izquierda y palanca derecha. La velocidad y la dirección pueden ser controladas de forma progresiva con cualquier mano. La palanca de la mano derecha requiere ser empujada hacia adelante para incrementar la velocidad y ser empujada hacia atrás para controlar la velocidad de retroceso. La palanca de la mano izquierda es lo opuesto, ej. Empujar hacia adelante es para ir marcha atrás y empujar hacia atrás es para ir hacia adelante (nº1 en Figura A).

Claxon

Presione para utilizar (nº2 en Figura A).

Indicadores de intermitentes

Mano izquierda y derecha. Presione para activarlos y presione de nuevo para apagarlos. Los indicadores son acompañados por una advertencia sonora (nº 3 en Figura A).

Luces de advertencia de los indicadores

Se encienden al utilizar los indicadores (nº4 en Figura A).

Luces de advertencia de emergencia

Enciende todas las luces indicadoras al mismo tiempo. Sólo para uso en emergencias y es acompañado por una advertencia sonora (nº5 en Figura A).

Interruptor de los faros

Esto enciende las luces delanteras y traseras (nº6 en Figura A)

Luz de advertencia de los faros

Se enciende cuando las luces están en uso (nº 7 en Figura A)

Luz de batería baja

Se encenderá cuando la batería esté baja (nº 8 en Figura A)

Interruptor de encendido / apagado

Inserte la llave tipo Jack y presione hasta el fondo para encenderlo. Para apagarlo, estire de la llave hasta que las luces del tablero se apaguen. Siempre apague el scooter antes de bajarte de él, y siempre retire la llave antes de dejar el scooter sin vigilancia (nº9 en Figura A) Si se deja encendido el scooter durante un periodo de tiempo sin usarlo, el scooter entrará en "modo de reposo" y se apagará. Para reactivarlo para su uso normal, apague el motor, espere unos minutos y entonces enciéndalo de nuevo.

Freno de emergencia

Todo el frenado en el Mystere es automático, y nunca debería ser necesario utilizar el freno de emergencia. Es sólo por si fallaran los frenos automáticos. Si se utiliza, esta palanca cortará toda la energía del scooter y hará que se detenga. La palanca está localizada en la mano izquierda.



Figura A

SG7 MYSTERE

Panel de información visual

Esto proporciona varios controles e información que se enumeran a continuación.

1. Velocidad seleccionada: Alta / Baja
2. Velocidad seleccionada: 1-5
3. Hora
4. Carga Restante de la Batería
5. Temperatura ambiental

Todas estas funciones son controladas por los tres botones debajo de la pantalla.

6. Función Seleccionar
7. Función Incrementar
8. Función Disminuir

Selección de velocidad

Mientras que las palancas de control de velocidad del manillar (nº1 en Figura A) controlan de forma progresiva la velocidad de conducción, la selección de velocidad del panel de control fijará el límite de la velocidad máxima. Esto es requerido por la ley, ya que aunque su Mystere tiene una velocidad máxima de 13 kph, de acuerdo con la ley no puede exceder las 6.5 kph en caminos para peatones y en zonas comerciales. Además, esto es útil cuando vaya de compras o viaje por zonas concurridas para reducir el límite de velocidad aún más. Esto también tiene la ventaja de dar una aceleración mucho más suave.

Cuando encienda su Mystere, la pantalla parpadeará inicialmente con una gran cantidad de figuras y entonces se pondrá en blanco, después de esto se iluminará y mostrará las lecturas correctas. Hay tres lecturas relativas a la selección de velocidad.

La primera es la velocidad alta (13 kmh) y baja (6.5 kmh), que se muestra en la pantalla como H para alta y L baja (nº 1 en Figura B). Se puede cambiar de H a L al presionar el botón del centro (nº6 en Figura B) una vez. Luego tiene una variación de la velocidad que va de 1 a 5 para ambos H y L. Esto es controlado por los botones para el incremento (nº7 en Figura B) y decremento de la velocidad (nº8 en Figura B). Esto se puede ver (nº2 en Figura B), y también los 5 bloques en la parte derecha de la pantalla se incrementarán o disminuirán con la selección de la velocidad.

Reloj

Se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla del panel (nº3 en Figura B). Para cambiar la hora mantenga presionado el botón del centro (nº 6 en Figura B) durante cuatro segundos y entonces el reloj cambiará a horas, minutos y segundos, con las horas parpadeando. Se puede cambiar las horas utilizando los botones 7 y 8. Presione el botón 6 de nuevo y los minutos empezarán a parpadear. Configure los minutos según se requiera y repita el mismo proceso con los segundos.

Fecha

Presione el botón (nº6 en Figura B) y la fecha aparecerá en lugar de la hora. Por favor, tenga en cuenta que la fecha aparecerá de manera inversa. Es decir, el año aparecerá primero, seguido del mes, y terminando con el día. Repita la secuencia de arriba para cambiar la fecha.

Temperatura

Esto aparecerá en la esquina inferior izquierda (nº5 en Figura B) y puede ser cambiada de °C a °F al presionar cualquiera de los botones 7 u 8.

Indicador de carga restante de la batería

Esta es la última función de la pantalla de visualización y se muestra con cinco bloques en el lado izquierdo (nº4 en Figura B). También se muestra con el dibujo de la batería mostrando cinco líneas. Cuando todos los bloques y líneas son mostrados significa que la batería está completamente cargada. Cada bloque y línea representa un 20% de la carga de la batería. Cuando sólo quede un bloque se recomienda cargar la batería de inmediato. La luz (nº8 en Figura A) se enciende cuando la batería está baja.

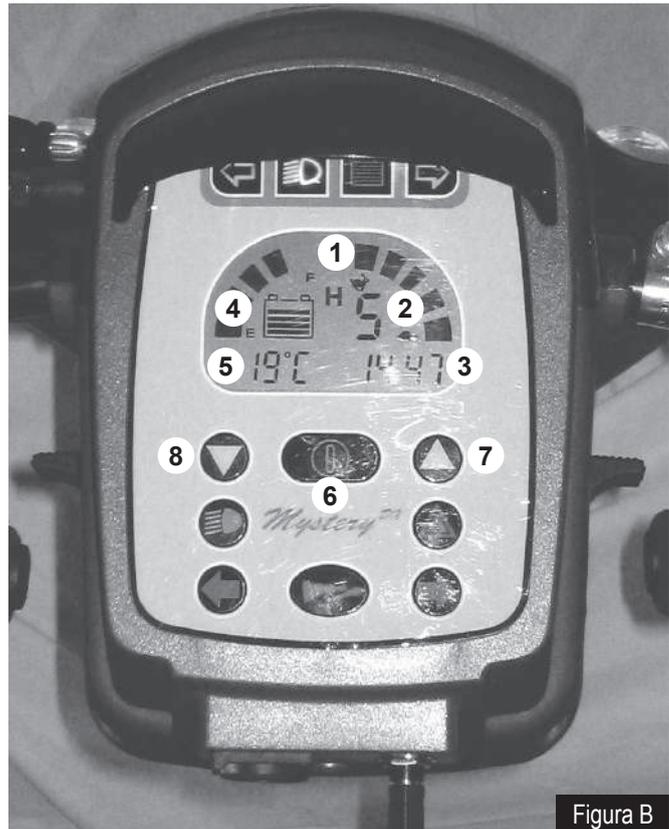


Figura B

4. AJUSTE DEL ASIENTO

El asiento se puede girar por completo en un ángulo de 360°. Esto permite una variedad de diferentes posiciones si necesitas sentarte frente a una mesa, etc. El girarlo en ángulo de 90° permite una fácil entrada y salida. La palanca está ubicada en el lado derecho del asiento (nº2 en Figura C). Cuando se libere la palanca asegúrese de que el asiento esté asegurado en su posición (nº1 en Figura C)

La palanca de ajuste del asiento está ubicada en la parte delantera del asiento y permite que el asiento sea ajustado hacia adelante o hacia atrás.

La palanca de ajuste del respaldo está ubicada en el lado izquierdo del asiento y permite que el respaldo sea ajustado para una tener una mayor comodidad (nº1 en Figura D)

Se puede ajustar el ángulo de ambos reposabrazos al utilizar la palanca que se muestra (nº2 en Figura D). El reposacabezas se puede subir con sólo estirar hacia arriba. Para bajarlo hay una pequeña palanca ubicada en la parte superior del asiento en la base del soporte izquierdo del reposacabezas. Simplemente mueva la palanca y ajústelo a la altura deseada (nº 3 en Figura D).

La altura del asiento es ajustable, vaya al apartado “Ensamblado” para más detalles.

La palanca del timón permite que el timón se pueda mover a una posición más cómoda para conducir. Presione la palanca (nº1 en Figura E) ajuste el timón a su posición preferida y libere la palanca. Asegúrese de que el timón quede asegurado en su posición.

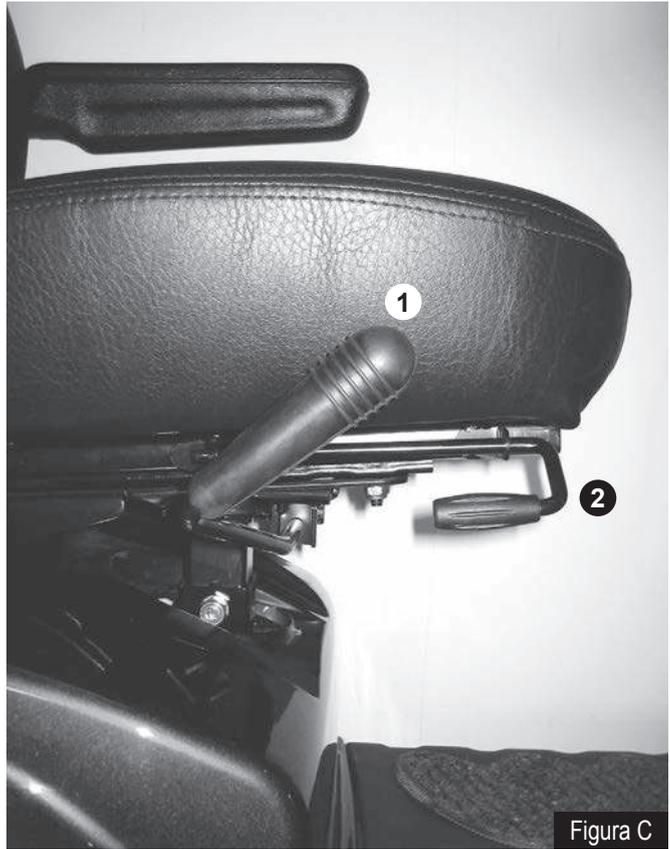


Figura C



Figura D



Figura E

5. FUNCIONAMIENTO

Antes de conducir el scooter asegúrese que la batería esté completamente cargada y compruebe que los neumáticos estén bien inflados. Consulte la sección "Mantenimiento" para más detalles sobre las revisiones mensuales y sobre la presión de los neumáticos. Revise que la llave esté en modo OFF antes de subir. Una vez que esté cómodamente sentado, asegúrese que la palanca del asiento esté asegurada y el asiento sea seguro. Observe que los reposabrazos se encuentren bajados en la posición correcta.

- Ajuste el Mystere en velocidad baja. Sujete el timón con ambas manos y suavemente empuje la palanca de control de velocidad derecha para mover el Mystere hacia adelante. Mientras más empuje la palanca, más rápido irá. Siempre deténgase antes de cambiar la velocidad de H a L.
- Liberar las palancas de control de velocidad automáticamente activa los frenos para reducir la velocidad y para detenerse. Una vez detenido, el freno de mano se activará automáticamente.
- Utilice el timón para dirigir.
- Ajuste la velocidad en el rango de seguridad ideal al presionar el botón de control.
- Para ir en reverso empuje la palanca de control de velocidad izquierda. La velocidad se reduce automáticamente por razones de seguridad.
- Para cambiar de la acera a la carretera, o de la carretera a la acera, debe tratar de encontrar una pendiente adecuada. Mystere puede subir o bajar por los bordes de las aceras de hasta 80 mm de alto, pero debe aproximarse al borde en el ángulo correcto 90°, para que las dos ruedas delanteras suban o bajen al mismo tiempo. Debe detenerse justo antes de llegar al borde y,
 - Si está subiendo: seleccione un ajuste de alta velocidad y maniobre hasta que ambas ruedas traseras se encuentren sobre la acera, entonces disminuye la velocidad de inmediato.
 - Si está bajando: proceda lentamente en un ajuste de velocidad baja nivel 1 hasta que se encuentre en la carretera, entonces cambie a una velocidad más adecuada para cruzar el camino con seguridad.
- El Mystere es apto para ser utilizado en carretera pero se debe tener mucho cuidado e ir a la velocidad máxima de 8 mph, ya que podría representar un peligro para los usuarios de otros vehículos de mayor velocidad.
- Vigile su Indicador de batería. La distancia que puede recorrer depende de muchos factores, mientras más pendientes, menor distancia podrá recorrer. Le recomendamos que explore esto gradualmente viajando un poco más lejos cada día.
- En caso de que se "agotara" la batería antes de que llegue a su hogar, hay dos cosas que puede hacer para evitar quedar varado. Detener y apagar el vehículo con la llave de 5 a 10 minutos le permitirá a la batería "recuperar" un poco de energía para conseguir viajar un poco más lejos. Puede intentar esto varias veces. Si no tiene suerte y no puede regresar a casa utilizando la energía de la batería, hay un dispositivo de conducción libre que le permitirá a alguien empujar el Mystere (consulte "Liberación del freno de mano").
- La distancia que puede recorrer es influenciada por muchas condiciones ambientales. Las colinas disminuirán substancialmente la distancia. Establezca la que puede recorrer en los alrededores de su localidad al incrementar gradualmente la distancia y revisar el indicador de batería al final de cada viaje.
- Reducir la velocidad también reducirá la energía. Para escalar obstáculos o colinas necesitará incrementar el ajuste de velocidad para obtener el impulso necesario y entonces controlar la velocidad con las palancas para ir en reverso y hacia adelante.

Estacionarse

1. Antes de dejar el scooter, apague el motor y entonces el indicador de la batería se apagará. Retire la Llave de Encendido/Apagado por razones de seguridad.

2. Si el Mystere ha sido utilizado en el modo de conducción libre (consulte "Liberación del freno de mano"), es MUY IMPORTANTE volver a conectar la unidad para asegurarse que el freno de mano del scooter está activado antes de bajar.

3. Levante los reposabrazos para hacer que sea más fácil bajarse del Mystere, o gire el asiento 90°.

6. ENSAMBLADO

El Mystere fue inspeccionado y probado antes de ser enviado. Las baterías podrían haber sido desconectadas sólo para fines de envío. Saque todos los objetos de la caja y retire los materiales de protección de cada objeto.

Ajustar del timón


Presione hacia abajo la palanca del timón y estire hacia arriba el timón hasta la posición deseada. Libere la palanca y asegúrese que el timón esté asegurado (Figura E).

Retirar el asiento

Para retirar el asiento, libere la palanca de fijación del asiento presionándola hacia abajo y al mismo tiempo estira y levante el asiento (nº1 en Figura C).


Retirar la cubierta trasera

La cubierta se mantiene en su lugar mediante Velcro en la parte delantera, lateral y trasera. Sostenga la cubierta por los arcos de las ruedas y estire hacia arriba. Desconecte los conectores del cable de la luz trasera antes de retirar por completo la cubierta (Figura F).

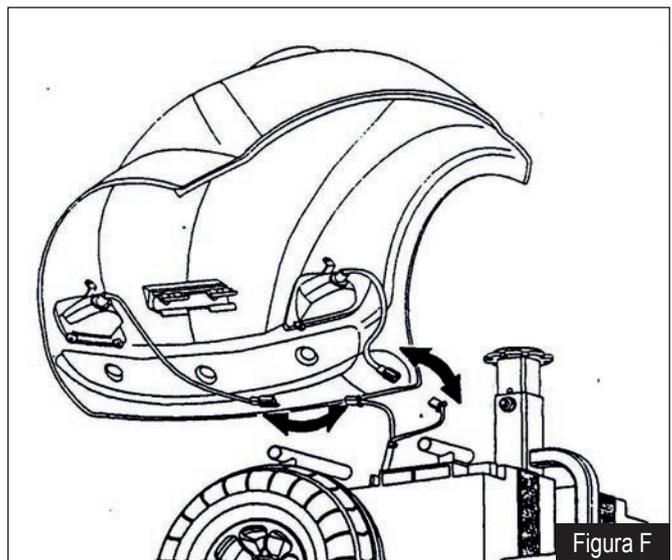

Conexión de la batería

Las baterías ya se encuentran instaladas y están fijadas por una correa de velcro. Por razones de seguridad podrían haber sido desconectadas durante el envío. Una los conectores correspondientes firmemente. Estos difieren en tamaño y forma por lo que no pueden ser conectados de forma incorrecta (Figura G).

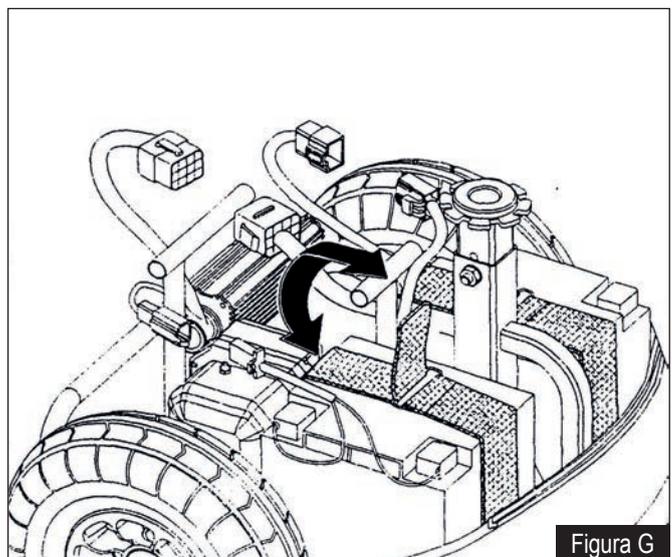


Ensamblar la cubierta trasera

Las luces traseras tienen que ser conectadas antes de colocar por completo la cubierta trasera. Los conectores están marcados 'L' y 'R' (Izquierda y Derecha). Tenga cuidado de conectarlos de la forma correcta y de no aplastar los cables cuando coloque la cubierta. Ubique el agujero en la cubierta sobre el mecanismo del asiento y las pestañas en frente de la cubierta dentro de las ranuras del reposapiés y presione hacia abajo para engancharlo con el Velcro (Figura F).

Colocar el asiento

Coloque el montaje del asiento sobre el pilar del asiento y presione hacia abajo, mientras sostiene la palanca de liberación del asiento hacia arriba. Libere la palanca y gire parcialmente el asiento para verificar que el seguro del asiento se ha activado. Opere el seguro del asiento de nuevo al presionarlo hacia abajo y gire el asiento 90°, libere la manija del seguro del asiento y compruebe que el asiento quede asegurado en la nueva posición. Repita esto de manera que el asiento quede orientado hacia adelante en la posición normal para conducir.

La altura del asiento puede ser ajustada al retirar la tuerca y el perno que sostienen la sección superior del pilar del asiento, para entonces mover la sección superior a la altura deseada y entonces volver a colocar la tuerca y el perno (Figura H).

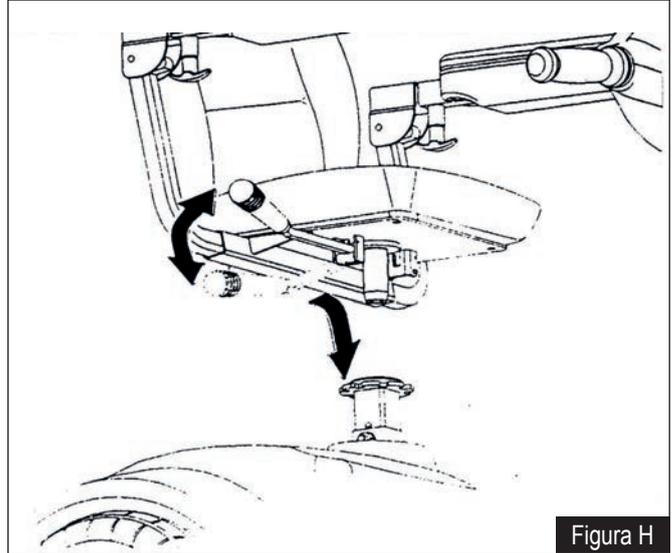

Plegado

Para facilitar la carga y el transporte, puede que en algunos casos sea más fácil desmontar el Mystere.

- Retire el asiento
- Retire la cubierta trasera
- Retire las baterías. Desconecte los conectores, retire las correas de Velcro y saque las baterías. Tenga cuidado al levantarlas ya que son pesadas.
- Vuelva a colocar la cubierta trasera.
- Doble hacia abajo el timón.

Esto es lo máximo que se podrá desmontar el Mystere.



ADVERTENCIA

Todos los componentes son pesados: busque ayuda si cree que podría lesionarse al levantar ese peso.



Al transportar el Mystere, por favor recuerde que hay varios componentes que pueden ser potencialmente peligrosos si se desprendieran durante un frenado de emergencia. Asegúrese de que estén empaquetados y atados de forma segura para evitar su movimiento.

Liberación del freno de mano

Se puede liberar el freno de mano en caso de que por alguna razón se necesitara conducir el Mystere sin utilizar el motor. La palanca para liberar el freno se encuentra en la parte trasera derecha del scooter. Tiene un extremo rojo y solo se necesita empujarla hacia abajo para soltar el freno. Para volver a colocar el freno, levante la palanca hasta su posición máxima.

Nota: Si se libera el freno, el Mystere no funcionará eléctricamente.

Interruptor de seguridad contra sobrecarga

Si el motor o los circuitos eléctricos se sobrecargan (una pendiente muy inclinada o una acera muy alta serían posibles ejemplos de lo que podría ocasionar esto), puede activar el interruptor contra sobrecarga. Esto provocará un apagón eléctrico completo del Mystere y el freno de mano se activará. Se puede restablecer después de un pequeño tiempo de espera. Se localiza bajo la cubierta trasera en una placa plana en la parte trasera izquierda. Simplemente presione el botón. Si el botón no se queda presionado, espere unos minutos e inténtelo de nuevo. Si no se restablece póngase en contacto con su distribuidor. Nunca trate de mantener el botón presionado mediante cualquier otro medio.

7. CARGA DE LA BATERÍA

El cargador de batería proporcionado es especial para su Mystere y por lo tanto podría no ser adecuado para cualquier otro producto de movilidad motorizada. Sólo debe cargar su Mystere con el cargador proporcionado, ya que los otros podrían dañar permanentemente las baterías y anular la garantía.

El cargador es de tipo seleccionable para coincidir con fuentes de alimentación de 110v y de 220/240v. Se debería activar a 220/240v (tal como se suministra). También cuenta con un interruptor de Encendido/ Apagado en la parte trasera. Asegúrese que se encuentre encendido (los 110v se aplican sólo para EE.UU.).

Para cargar sus baterías siga los siguientes pasos:

- Apague su Mystere y retire la llave.
- Conecte el cargador en el enchufe situado en la parte trasera de la consola del manillar (nº2 en Figura E)
- Conecte el enchufe del cargador en una toma de corriente adecuada y enciéndalo.
- Verá 2 luces en la parte frontal del cargador.
- La luz roja indicará que hay un suministro de corriente y la otra luz será de color ámbar e indicará que las baterías se están cargando. Cuando la luz ámbar cambie a color verde significará que las baterías están completamente cargadas.
- Cuando estén cargadas, el cargador automáticamente detendrá la carga. Las luces seguirán encendidas pero la batería no puede sobrecargarse.
- Aunque para salir del problema se pueden cargar las baterías por un breve período de tiempo, siempre es mejor pasar por el ciclo completo de carga. Muchas cargas de tiempos cortos perjudicarán la vida útil de la batería.
- Para obtener los mejores resultados y prolongar la vida de la batería, trate de utilizar al menos el 50% de la batería antes de cargarla y, además, siempre es mejor pasar por el ciclo completo de carga.
- Dependiendo de cuánto se haya descargado la batería, el tiempo mínimo requerido para recargar baterías en estado útil puede ser de hasta 12 horas. Por favor, tenga en cuenta que este tiempo se puede incrementar a medida que las baterías envejecen. Durante períodos sin uso (quizás durante invierno) se recomienda cargar las baterías cada 4 a 6 semanas.
- Para obtener los mejores resultados, sus baterías necesitan cargarse en ciclos completos durante sus primeras 10-15 cargas. Esto significa agotarlas tanto como se pueda, de forma segura y darles una carga completa. Las baterías no funcionarán a su máximo hasta que este proceso haya sido llevado a cabo.
- Comprobará que la distancia a que su Mystere pueda viajar se incrementará gradualmente durante las primeras semanas de uso a medida que las baterías alcancen su máxima eficacia después de aproximadamente 12 ciclos de descarga y recarga.



No fume ni tenga una llama encendida mientras sus baterías se están cargando.
No utilice el cargador si este ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o ha sido mal utilizado de alguna forma. Llévelo con un técnico calificado.
No desmonte el cargador. Esto anulará la garantía.
No deje el cargador conectado a su Mystere con el interruptor del cargador en "encendido" ya que esto puede descargar sus baterías.

Para una carga completa

No apague, desconecte o interrumpa el ciclo de recarga hasta que el ciclo haya sido completado del todo.

Consejo para baterías duraderas y seguras

Para que tengan la vida más larga, sus baterías deben ser recargadas después de un uso razonable.

Si su Mystere no se utiliza durante un largo período de tiempo, se deberá darle una carga de restauración cada 4 a 6 semanas. Nunca deje sus baterías descargadas. Esto es particularmente importante para las baterías selladas, como las que tiene su Mystere.

Si tiene que guardar su Mystere durante algún tiempo, asegúrese que las baterías estén completamente

SG7 MYSTERE

cargadas antes de guardarlo. Cargue por completo las baterías antes de volver a utilizarlo. Cada seis meses revise las conexiones de las baterías, asegúrese que estén bien conectadas y limpias.



IMPORTANTE

Las baterías cuentan con una garantía limitada del fabricante original, que está sujeta a estrictas cláusulas de uso y desgaste. Cualquier fallo de la batería debido a un defecto del fabricante original se hará evidente dentro de los primeros dos meses. Cualquier deterioro gradual bajo uso después de este periodo se asocia con el uso y desgaste natural; el uso indebido o daños accidentales no son cubiertos por la garantía del fabricante.

8. MANTENIMIENTO

Recomendamos que el Mystere tenga una revisión de uso y mantenimiento anual realizada por su distribuidor. A continuación detallaremos revisiones semanales/mensuales que mantendrán la máquina en un buen estado de funcionamiento.

- No aplique aceite o grasa a cualquiera de los componentes. Los rodamientos sellados y las protecciones de nylon eliminan la necesidad de lubricación.
- Mantenga todos los componentes limpios y secos.
- Mantenga los neumáticos inflados a 34 psi. La baja presión en los neumáticos degradará el rendimiento, así que revise la presión frecuentemente.
- Revise las llantas en busca de desgastes. Reemplácelas tan pronto haya algún signo de desgaste excesivo.
- El Mystere utiliza baterías libres de mantenimiento, son a prueba de filtraciones, independientemente de la posición. La carga de la batería es el único mantenimiento necesario (consulte las instrucciones de carga). NO deje las baterías descargadas, cárguelas cada 4-6 semanas si el Mystere no está siendo utilizado.
- Revise que los conectores de los cables eléctricos están correctamente colocados y seguros.
- El reemplazo de la batería depende del uso: por lo general duran hasta 3 años. Cuando las baterías pierden energía demasiado rápido, es probable que ya necesiten ser reemplazadas. Las instrucciones de instalación están incluidas con las baterías de reemplazo.
- Las reparaciones relacionadas con los componentes eléctricos o mecánicos deberán ser realizadas únicamente por su distribuidor de Mystere.

Tapicería del asiento

Un paño húmedo y un poco de jabón mantendrán su asiento y respaldo en buenas condiciones. No utilice limpiadores abrasivos ya que esto dañará el revestimiento. La tapicería se puede dañar con los limpiadores químicos. La luz ultravioleta también puede reducir la vida del material del revestimiento del tapizado. Este es un proceso de envejecimiento normal y no se puede garantizar (consulte la sección de "Garantía").

Carrocería

La carrocería de su Mystere puede lavarse suavemente con agua jabonosa limpia. Se puede utilizar cera para coches para mantener la pintura y la carrocería en perfectas condiciones. No utilice limpiadores abrasivos o detergentes fuertes ya que esto puede dañar el color.

Partes electrónicas

La reparación y mantenimiento de las partes electrónicas y del cargador de la unidad sólo deben ser realizados por su distribuidor. Estas unidades están selladas y no deberán ser abiertas. Los SELLOS ROTOS INVALIDARÁN la GARANTÍA.

Frenos del motor

Si los frenos del motor están funcionando correctamente, no será capaz de empujar su máquina cuando esté apagada o cuando esté encendida con el control de velocidad en posición neutral.

Si su máquina puede ser empujada cuando se encuentra bajo las condiciones descritas anteriormente, los frenos del motor podrían estar defectuosos.



No utilice el scooter y contacte a su distribuidor. Por su propia seguridad, le recomendamos que verifique el funcionamiento de sus frenos antes de cada viaje.

Freno de Conducción

Cuando conduzca su Mystere y suelte el control de velocidad, esto debería reducir la velocidad muy rápido. Si nota un cambio en la condición normal de desaceleración/conducción y su Mystere no desacelera rápido por favor, no lo utilice y contacte con su distribuidor.

Baterías

Mantenga sus baterías bien cargadas (consulte la sección "Carga de la batería"). Preserve sus baterías limpias, en un lugar seco y protegido del frío. Conserve los terminales de la batería bien ajustados.



IMPORTANTE

No es posible predecir la esperanza de vida de sus baterías. Esto se debe principalmente a las diferentes cargas de trabajo a las que pueden estar sometidas.

Algunos usuarios de Mystere utilizarán su scooter todos los días y durante largos períodos de tiempo. Sus baterías se descargarán casi totalmente y de forma regular y su vida será corta (12 meses o menos en algunos casos). Otros usuarios de Mystere utilizarán sus vehículos con menor frecuencia, haciendo que sus baterías tengan un estilo de vida de descarga menos demandante. Éstas probablemente tendrán una vida más larga (12 a 24 meses o más).

Cuando tenga que reemplazar las baterías, siempre instale el modelo designado como equipamiento estándar para su Mystere. Si tiene dudas, consulte a su distribuidor.



No moje su Mystere con una manguera. El agua podría entrar en sus partes electrónicas y causar daño permanente.

No guarde su Mystere en un lugar con condiciones húmedas. Esto podría afectar a sus partes electrónicas si se deja ahí durante períodos largos de tiempo.

No opere su Mystere en condiciones climáticas extremas, ej.: bajo lluvia intensa. No conduzca a través de agua profunda. Esto podría dañar el controlador electrónico principal de las piezas electrónicas.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Su Mystere no arranca: verifique que no haya entrado en modo de reposo. Asegúrese de que la llave esté puesta y en posición de encendido. Si es así, el indicador de carga de la batería debería estar funcionando. Si aparece que la batería está vacía, recarguela.
- El indicador de carga de la batería no está funcionando a pesar que la llave está en posición de encendido. Compruebe lo siguiente: asegúrese de que el cargador de la batería no esté enchufado a la toma de corriente, esto evitará el arranque. Revise que la liberación del freno no está desactivada. Revise la condición de los conectores de la batería y de la terminal de la batería. Si ninguna de las anteriores funciona contacte con su distribuidor de Mystere.
- Si su Mystere no desacelera o el control de velocidad variable no funciona: apague la máquina con la llave de encendido. Informe a su distribuidor autorizado.
- El Mystere se detiene y no vuelve a arrancar. Revise el interruptor de sobrecarga, el cual puede ser restablecido con sólo presionar el botón correspondiente.



IMPORTANTE

Si encuentra que por alguna razón su Mystere no reduce su velocidad cuando suelta la palanca de dirección, utilice el freno manual en el manillar. Si esto no logra detenerlo, apague su Mystere con la llave de Encendido/Apagado. El freno de mano se activará de inmediato y se detendrá. Tenga cuidado ya que la máquina se detendrá súbitamente, así que sujétese del manillar y siéntese correctamente en el asiento.



Esta operación sólo debe realizarse como medida de emergencia; el uso continuo de este procedimiento dañará la transmisión de la unidad y el freno del motor. Consulte a su distribuidor autorizado antes de utilizar su scooter de nuevo. Si siente que por alguna razón no está funcionando correctamente o está haciendo un ruido inusual, deje de utilizarlo. Piense en su SEGURIDAD, contacte con su distribuidor, él será capaz de aconsejarle.

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones:

Longitud total.....	1450 mm.....	57 pulgadas
Ancho total	640 mm.....	25 pulgadas
Radio de giro.....	1400 mm.....	55 pulgadas
Distancia al suelo	165 mm.....	6.5 pulgadas
Altura ajustable del asiento (desde la plataforma para los pies)	460 mm.....	18 pulgadas
Ancho de los asientos	495 mm.....	19.5 pulgadas
Altura del respaldo	480 mm.....	19 pulgadas
Tamaño de los neumáticos.....	310 x 95 mm.....	12 pulgadas x 4 pulgadas
Presión de los neumáticos	34 psi.....	2.4 bar
Peso (Incluyendo baterías)	112 kg.....	245 lbs.
Peso de la batería	15 kg c/u.....	33lb c/u
Peso máximo de carga	179 kg.....	28 piedras
Velocidad máxima	12 kph.....	7.5-8 mph
Ángulo seguro de subida.....	12 grados	12 grados
Distancia de viaje (afectado por el usuario terreno/condiciones)	Hasta 32 km	Hasta 20 millas

Otras especificaciones:

Controlador.....	Dinámico
Cargador	115-230 volt 5 amp
Batería	2 x 12 v 50 a/h ácido de plomo sellado

11. CONSEJOS DE CONDUCCIÓN SEGURA

Evite los problemas antes de que aparezcan. Si detecta una vibración o ruido inusual durante la operación de su Mystere, trate de determinar la causa. Asegúrese de que el equipo esté apagado antes de inspeccionarlo. Si no puede descubrir el origen del problema contacte con su distribuidor.

Chequeos en las aerolíneas

Las baterías de ácido de plomo están permitidas en los aviones. Una etiqueta en la caja de la batería indica de qué tipo son. El personal de la aerolínea podría insistir en retirar la cubierta de la batería para verificar su contenido. Se aconseja consultar esto con la aerolínea con anticipación.

Almacenamiento

Evite almacenar su Mystere en lugares con calor o frío extremos. Si estuviera disponible, lo ideal sería un lugar seco y fresco. Los siguientes pasos le ayudarán a prevenir que el óxido y la corrosión afecten el funcionamiento y la apariencia de su Mystere. Gire la llave a la posición de apagado. Limpie todas las superficies exteriores y retoque cualquier parte donde la pintura esté dañada. Revise e infle los neumáticos a 34 PSI. Asegúrese que la batería esté completamente cargada antes de almacenar su Mystere por largos periodos de tiempo y asegúrese de recargarlo cada 6 semanas. El incumplimiento de esto puede resultar en la necesidad de reemplazar la batería.

Baterías

El mantener su Mystere trabajando a su máximo potencial significa que sus dos baterías deben mantenerse a potencia máxima. Recargarlas por la noche, después de su uso, ayudará a que tengan una vida útil más larga y le asegurará que su Mystere siempre estará listo para salir. Sin embargo, también es una buena idea que ocasionalmente utilice las baterías hasta agotarlas, ya que esto permite que reciban una carga completa. Su Mystere está equipado con dos baterías selladas sin necesidad de mantenimiento, especialmente diseñadas para la movilidad motorizada. Esto significa que no tiene que preocuparse por llenarlas.



No intente retirar las válvulas de seguridad localizadas en la parte superior de la batería.
El incumplimiento de esta advertencia anulará la garantía de la batería.

Las baterías de su Mystere no requieren mantenimiento porque los electrolitos están inmovilizados de una forma especial y no se filtrarán, incluso si las baterías se tumban.

Los scooters se dividen en dos categorías. La clase 2, que es esencialmente un vehículo a 6,5 km/h. La clase 3 es capaz de circular hasta de 6,5 a 13 Kph y está equipada con luces delanteras y traseras, indicadores de cambio de dirección, bocina y espejo retrovisor. Revise las leyes viales para saber con exactitud las limitaciones de uso de scooters en su zona, en este caso, su Mystere es un Clase 2, vehículo capaz de circular a 6,4 km/h.

Adelantar a un vehículo estacionado

Tenga mucho cuidado de que no se meta en un carril donde vengan vehículos más rápidos por detrás de usted. Siempre señale sus intenciones.

En el caso de una situación difícil o peligrosa use las luces de emergencia, sin embargo, no conduzca con ellas de forma innecesaria

Seguros

No hay ningún requisito legal para el seguro, pero es una muy buena idea tener una cobertura de incendio y robo, daño accidental y malicioso, y también para daños a terceros. Contacte con su distribuidor para más información.

Teléfono móvil

Un elemento esencial si usted está fuera solo. Nunca se sabe, averías, accidentes, salud. La comunicación es una necesidad.

Transporte de cargas

No sobrecargue el scooter. Puede hacer que el vehículo sea inestable y reducir su alcance. Coloque las cargas pesadas hacia el interior - en el centro - no detrás de la rueda trasera ya que se puede aligerar la dirección o puede hacer que el extremo delantero se levante de la carretera en un bache. Tampoco lo sitúe en la parte delantera ya que puede hacer la dirección pesada.

Controle los frenos

Nunca trate de conducir, o incluso sentarse en su vehículo mientras está en "rueda libre" (desembragado) (freno del motor automático desactivado). El freno electrónico estará fuera de acción y el vehículo podría desplazarse sin control.

Mantenimiento

Lleve a cabo las comprobaciones que se indican en este manual con regularidad.

Neumáticos

Mantenga los neumáticos a la presión recomendada por el fabricante. Tendrán una duración más larga y segura. Reemplácelos cuando se hayan desgastado.

Luces

Compruebe con regularidad y reemplace las bombillas cuando sea necesario, utilice las luces con frecuencia, a partir del anochecer, en un día nublado o lluvioso. Sin embargo, recuerde que el uso de las luces puede reducir el alcance de su scooter.

12. DIRECTRICES PARA LA SEGURIDAD

Uso en aceras

Circular por la acera o paso peatonal no le convierte a usted en un peatón. Si usted está en un vehículo motorizado ya no es un peatón. Así que tenga cuidado.

Recuerde, los peatones siempre tienen prioridad de paso

Mucha gente de a pie va a ser amable y ayudará a los conductores de una silla de ruedas o un scooter, ¡pero no todo el mundo!

En un recinto lleno de gente

Es su responsabilidad asegurarse de que no atropelle o golpee a cualquier persona o que nadie dañe a su vehículo. Mientras que mucha gente le cederá el paso, usted no debe esperar que todos lo hagan. Algunos ni siquiera se darán cuenta de que está usted ahí. También sea muy consciente de los pies de la gente.

Subir o bajar bordillos

Siempre abórdelos en ángulo recto, con sus ruedas delanteras de frente a la acera. No subir o bajar bordillos más altos que los que el fabricante recomienda. Muévase con cuidado para evitar golpes traumáticos - a usted mismo y al vehículo.

Cuidado con:

- Niños: Es muy posible que se crucen en frente de usted sin previo aviso.
- Las personas de edad avanzada: Pueden ser incapaz de moverse rápidamente a un lado para dejarle pasar. Deje suficiente espacio.
- Las personas de movilidad reducida a pie: ellos también pueden ser incapaces de esquivarle.
- Las personas con problemas visuales o auditivos: Hay que darles espacio y tiempo.
- Otros usuarios de vehículos motorizados: Usted puede estar haciendo todas las cosas correctas pero esto no garantiza que los demás hagan lo mismo.

Cuando usted necesite ayuda:

- Puede que tenga que pedir a la gente abrir puertas para usted. La mayoría de la gente está dispuesta a ayudar si lo pide cortésmente. No luche por hacer lo imposible cuando hay gente alrededor que le ayudará si se lo pide.
- Conduciendo dentro de tiendas y edificios: La mayoría de las tiendas más grandes, e incluso algunas muy pequeñas, son accesibles a Mystere
- Velocidad en las tiendas y edificios: ¡Redúzcala! Es una buena idea establecer el control de velocidad a un nivel inferior para evitar cualquier accidente. Tenga especial cuidado si usted necesita cambiar de dirección, vigile que el camino esté libre de accesorios de la tienda y de

personas.

13. CONDUCIR EL VEHÍCULO POR CARRETERA

Usted es responsable de su propia seguridad y la de los demás usuarios. Las leyes viales de la carretera deben de aplicarse

- Use la acera: Es aconsejable evitar el uso de las carreteras, intente usar la acera.
- En la carretera: Recuerde que usted no está manejando un coche u otro automóvil, sino un vehículo muy pequeño y lento, que es por lo tanto más vulnerable.
- Conducción en el lado derecho de la carretera: Nunca conduzca en contra del tráfico.
- Calles de dirección única: Nunca conduzca contra el tráfico
- Ceder el paso a los coches igual que ellos lo harían (detalles en el código de circulación).
- Obedecer las luces de tráfico, todas las señales de tráfico y otras instrucciones.
- Ceder el paso a los peatones en los cruces.

Pero recuerde siempre que su vehículo no es un coche y es pequeño y vulnerable. Si necesita girar a la izquierda a través del tráfico, trate de hacerlo cerca de la acera y luego use un cruce peatonal seguro o el control de semáforos de cruce. Sólo trate de girar a la izquierda si usted está completamente convencido de que es seguro hacerlo. No confíe sólo en su espejo. Se puede dar una falsa impresión de la distancia. Siempre ofrezca una indicación clara de la intención de girar a la izquierda o a la derecha.

14. GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de fabricación de los productos. Quedan excluidos los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por un uso indebido, así como la falta de mantenimiento.

La garantía no cubre modificaciones en el producto, así como el empleo de recambios no originales.

En el caso que requiera una reparación de su productos, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

