



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO - AD 752



POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL SILLON ELEVADOR KOBAN

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad.

El sillón Koban se eleva lentamente inclinándose hacia delante ayudando a incorporarse y ponerse de pie de forma fácil y segura. También tiene la función de reclinación para adoptar una postura de descanso.

Condiciones de almacenaje

El sillón Koban debe ser almacenado en un lugar seco y templado, respetando la posición vertical de almacenamiento de la caja de cartón.

Advertencias de seguridad

- Es aconsejable una prueba práctica por parte del distribuidor o el instalador antes de su uso.
- Mantenga siempre una distancia mínima hasta la pared, de unos 60 cm, para evitar que al reclinar el respaldo toque con la pared.
- Asegúrese de que el sillón esté sobre una superficie totalmente plana, para que no pierda su estabilidad en la función de elevación.
- No coloque el sillón cerca de una fuente de calor.
- Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica de acuerdo con los estándares actuales y con el voltaje de la fuente de alimentación de 220V.
- En caso de tormentas, se recomienda no usar el sillón.
- El sillón elevador no debe moverse mientras se está usando.
- El usuario debe evitar que los niños utilicen el sillón.
- No se sienta en el soporte adicional para las piernas.
- Antes de mover el sillón, desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Utilice exclusivamente piezas de recambio y accesorios originales, garantizando así la seguridad del producto y manteniendo su conformidad.
- Se prohíbe modificar el sillón, en cuyo caso la garantía ya no será válida.
- No exponga el producto al sol, ya que puede dar lugar a una decoloración parcial del tapizado.
- El peso máximo del usuario no debe exceder de 160 kg.

Precauciones

El uso del sillón no está destinado para personas con desorientación, Alzheimer, etc. Y para usuarios que necesitan la ayuda y vigilancia de un tercero.


Montaje

1. Retire el sillón del embalaje.
2. Coloque el respaldo en la base del asiento, deslizando hacia abajo a lo largo de los dos rieles metálicos hasta que encaje y se escuche un clic.
3. Inserte en los orificios laterales traseros del asiento, las barras de los dos brazos (izquierdo y derecho)
4. Conecte el transformador al cable del actuador eléctrico, situado en la parte inferior del sillón.
5. Conecte el cable eléctrico al transformador.
6. Conecte el cable de alimentación a una red eléctrica de acuerdo con las normas vigentes y concuerde con el voltaje de la fuente de alimentación 220V.

Uso del mando del sillón

Control remoto seguro y reversible

- Gracias a su colocación debajo del cojín del reposabrazos, el mando no puede caer.
- Función Stop & Start: se detiene automáticamente cuando está sentado. Presione nuevamente el mismo botón para cambiar a la posición de elevación.

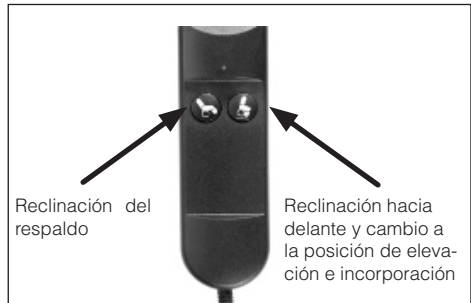

Partes del sillón



1. Respaldo
2. Respaldo acolchado lavable
3. Base del asiento lavable
4. Reposapiernas lavable
5. Reposabrazos abatible y desmontables
6. Acolchados de brazo
7. Mando

Reemplazar módulos acolchados del sillón

Acolchado del respaldo

- Retirar la correa de velcro de la solapa del acolchado, detrás del respaldo.
- Retire los velcros laterales izquierdo y derecho del acolchado.

Acolchado del asiento y piernas

- Retire las correas de velcro en la parte inferior del asiento situadas a la derecha y a la izquierda de la base.

Acolchado de los reposabrazos

- Levante el reposabrazos y retírelo del asiento.
- Retire la correa de velcro ubicada debajo del reposabrazos.

Especificaciones

MODELO	ANCHO ASIENTO	COLOR	ALTO TOTAL	ALTO ASIENTO	ALTO RESPALDO
AD 752 C44	44 cm	Chocolate	108 cm	43 cm	68 cm
AD 752 B44	44 cm	Beige			
AD 752 C50	50 cm	Chocolate			
AD 752 B50	50 cm	Beige			

Mantenimiento y limpieza

Todos los módulos acolchados pueden ser lavados a máquina a 30° C.

No utilice detergentes abrasivos para lavar los módulos.

Las manchas de tinta de los bolígrafos, requieren una limpieza inmediata.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.

**El sillón elevador cumple con los estándares CEM / EMF (marcado CE) EN 55014-1
EN 55014-2 EN 61000-3-2 ES 61000-3-3 ES 62233 Informe de ensayo COFRAC**

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTAS



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

