



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO - AD 203 / AD 205



INDICE

Introducción.....	4
1. Símbolos utilizados.....	4
1.2 Contenido y estado del paquete	4
1.3 Transporte/ Embalaje/Desempaquetado/Comprobación.....	4
1.3.1 Desempaquetado	4
1.4 Instrucciones del fabricante para los distribuidores	4
1.5 Señalización y etiquetas de identificación del modelo	5
2. Uso previsto	5
2.1 Uso inapropiado	5
3. Seguridad	5
3.1 Evaluación general de peligro	5
3.2 Consejos generales de seguridad	5
4. Componentes	5
5. Plegado/Desplegado	6
5.1 Desplegado	6
5.2 Plegado	6
5.3 Ajustar la altura del soporte axilar.....	6
5.4 Ajustar el marco.....	6
5.5 Rueda orientable y fijación de los frenos	7
6. Uso	7
6.1 Caminar	7
7. Limpieza	7
8. Mantenimiento	7
9. Datos técnicos	7
10. Desecho	7

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL CAMINADOR

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad.

Este manual de instrucciones está destinado a cualquier usuario, especialmente a los asistentes de personas con movilidad reducida, con la intención de proveer una base para el uso seguro y sin peligro del caminador.

Estas instrucciones describen la preparación, la manipulación, el uso y el mantenimiento y cuidado del producto.

Para garantizar un uso óptimo del caminador y mantener la seguridad de su manejo, lea atentamente el manual de instrucciones, siga las indicaciones que en él se dan y asegúrese que el manual permanece en todo momento localizable para el usuario.

1. Símbolos utilizados



¡PELIGRO! Indica una situación potencialmente peligrosa. Riesgo de accidentes graves, lesiones o daños al producto.



INFORMACIÓN IMPORTANTE: Datos a tener en cuenta.

1.2. Contenido y estado del paquete

El paquete contiene:

- El caminador con apoyo axilar.
- 1 Manual de instrucciones.
- 1 Caja de embalaje y envío (reutilizable).

1.3 Transporte/Embalaje/Desempaquetado/Comprobación

El caminador se suministra listo para ser usado. Ha sido montado y puesto a prueba por técnicos y asistentes de personas con movilidad reducida.



Antes de desempaquetar el suministro, compruebe el embalaje. Si está dañado, también podría estarlo el contenido. En caso de que el contenido esté visiblemente dañado, notifíquelo inmediatamente a la compañía de transporte.

1.3.1 Desempaquetado

El caminador está completamente envuelto en cinta protectora. Después de desempaquetarlo, deshágase de la cinta de acuerdo con las normativas locales.



¡No quemar la cinta! Podrían formarse gases venenosos.

Tras desempaquetar el producto, asegúrese de que contiene todas las partes en perfecto estado, de acuerdo con los documentos de entrega.

1.4 Instrucciones del fabricante para los distribuidores

El distribuidor debe comprobar:

- La integridad del caminador.
- La suavidad del movimiento de las ruedas.

- Que no haya partes dañadas. En especial, debe asegurarse de que el mecanismo de freno y los pasadores de resorte estén en perfecto estado.
- Que el producto se pueda montar sin problemas.

1.5 Señalización y etiquetas de identificación del modelo

Etiquetas de identificación del modelo y fabricante:



Las etiquetas deben permanecer legibles. Debe reemplazar inmediatamente etiquetas ilegibles o extraviadas. La etiqueta es muy importante para la identificación del producto. Dicha etiqueta no debe separarse del caminador en ningún caso.

2. Uso previsto

El caminador sirve como ayuda para caminar a personas con un movilidad reducida y un máximo de 100 kg de peso. El caminador sólo se debe usar en superficies planas.

2.1 Uso inapropiado

El uso con otros fines, especialmente como silla, escalera o para el transporte de cargas, es inapropiado y peligroso.

3. Seguridad


3.1 Evaluación general de peligro

Si se da un uso correcto y se cumplen las normas de seguridad, el uso del caminador no comporta ningún peligro. Los materiales utilizados y el diseño cumplen con los requisitos de las directivas de la CE, la Ley de productos médicos y las normas para los dispositivos médicos.

3.2 Consejos generales de seguridad

- No inclinar el caminador demasiado hacia los lados, ya que hay peligro de caída (ángulo máximo de inclinación: alrededor de 5°)
- Al plegar el caminador, pueden pinzarse partes de la ropa o del cuerpo.

4. Componentes

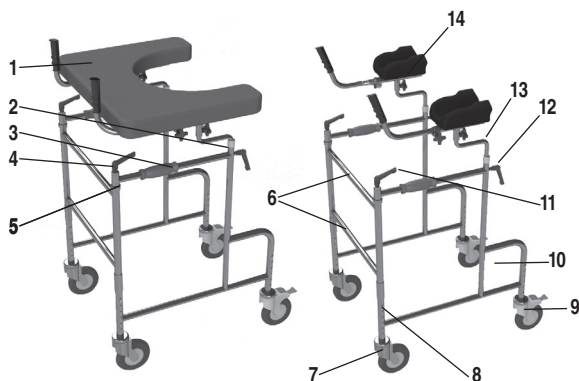

Almohadilla 1.

Palanca de bloqueo para el apoyo axilar y regulación de altura 2-11.

Puños 3.

Palanca de bloqueo del mecanismo de plegado 4-11.

Ajuste de la altura del caminador 14-8.

Marco frontal 6.

Ruedas orientables con freno 9.

Rueda orientable sin freno 7.

Ajuste de altura de las almohadillas de soporte de la axila 13-12-2.

Marco lateral 10.

Encaje para el plegado y desplegado 5-13.

Soporte antebrazo 14.

5. Plegado/Desplegado



Para facilitar el almacenaje, el caminador puede ser plegado. En ese caso, ocupa menos espacio. Para volver a usarlo, el caminador debe ser desplegado de nuevo. Siempre se deben bloquear las ruedas orientables antes de plegar o desplegar el caminador.

5.1 Desplegado

1. Colocar el caminador plegado delante de uno mismo.
2. Separar tirando de los puños y girar los marcos laterales hasta que queden paralelos.
3. El encaje de los tornillos (2) de sujeción deben encajar.
4. Atornillar firmemente el mecanismo de plegado con la palanca de bloqueo (1).
5. Comprobar el correcto bloqueo. Los marcos no se deben poder mover.



5.2 Plegado

1. Colocar el caminador delante de uno mismo.
2. Aflojar la palanca de bloqueo aproximadamente unas 4 vueltas.
3. Levantar ligeramente los marcos laterales por los puños y plegarlos hacia dentro.
4. Juntar los marcos laterales.



Después de plegarlo, el caminador no proporciona ninguna seguridad al apoyarse sobre él.

5.3 Ajustar la altura del soporte axilar



Si el ajuste de la altura de fábrica del caminador no es el adecuado, la altura se puede modificar moviendo las piezas de ajuste.

Para ello:

1. Aflojar los tornillos de sujeción.
2. Tirar o empujar los apoyos de las axilas hasta alcanzar la altura deseada.
3. Apretar de nuevo los tornillos de sujeción

5.4 Ajustar el marco

1. Apriete los botones (1) de las piezas que hay sobre las ruedas (2) y mueva dichas piezas hasta alcanzar la altura deseada.



¡Cuidado! ¡Riesgo de caída!

Para proporcionar la estabilidad necesaria para el usuario, los botones deben sobresalir de nuevo de uno de los agujeros de las piezas después del ajuste de altura y las cuatro patas deben estar a la misma altura.


5.5 Rueda orientable y fijación de los frenos



Dos de las ruedas orientables están equipadas con frenos de estacionamiento



¡Cuidado! ¡Riesgo de accidente!

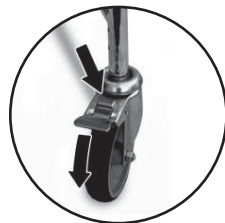

Si el freno de estacionamiento está dañado o inutilizable, no se debe usar el caminador.

1. Para accionar el freno, apretar con el pie la palanca de bloqueo por el lado ancho.
2. Para desactivar el freno, apretar con el pie la palanca pequeña. La palanca de bloqueo se afloja y la rueda queda libre.

6. Uso

6.1 Caminar



¡Cuidado! ¡Riesgo de resbalar o caerse!

Caminar siempre dentro del caminador y mantener ambas manos en las puños.

1. Para caminar seguro, dé siempre pequeños pasos y no empuje el caminador demasiado hacia delante.
2. Colóquese cómodamente con las axilas en las almohadillas de soporte.
3. Dirija el caminador con los puños.

7. Limpieza

No utilice detergentes abrasivos para limpiar el caminador. Un paño suave y agua jabonosa tibia son normalmente suficientes para mantenerlo limpio.

8. Mantenimiento

El caminador no requiere mantenimiento. Si fuese necesaria una reparación, contacte con el distribuidor.

9. Datos técnicos

Ancho entre los puños	Anchura total	Altura graduable	Profundidad	Máx. peso de usuario permitido
45,5 cm	58 cm	97-142 cm	66 cm	100 kg

10. Desecho

Si el caminador ha agotado su vida útil o no se puede utilizar por otras razones, todas las piezas deben remitirse al distribuidor.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
c/Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com



Fabricado por:

CHAINFEATS ENTERPRISE Co. Ltd.
F8, HSIN SHENG, TAIPEI, TAIWAN