



## BARRAS DE BAÑO AD569A / B / C / D

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

### DESCRIPCIÓN Y USO

Estas barras son robustas de acero inoxidable pulido. El tubo es de 32mm de diámetro y dispone de ranuras antideslizantes.

Ayuda a las personas discapacitadas o con dificultades a levantarse o sentarse.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Estas barras deben ser instaladas por un profesional con experiencia, que escogerá los elementos físicos apropiados para una instalación correcta.
- Se deben usar todos los agujeros de fijación en la pared. La barra debe apretarse bien, de modo que sea capaz de soportar el peso completo de una persona mediana. Antes de utilizar cualquier barra asegúrese que esté bien fija en la pared.
- Deben ser instaladas a una altura adecuada y cómoda para el usuario.

### CUIDADO Y LIMPIEZA

Las barras se pueden limpiar con un detergente neutro y agua.

### MEDIDAS

AD569A	30cm
AD569B	45cm
AD569C	60cm
AD569D	90cm



### GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:  
**Ayudas Dinámicas**  
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75  
[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)  
[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

