

H6550 – H6551 ESCALÓN

Introducción

Los escalones han sido fabricados en acero cromado con tacos de goma antideslizantes en las patas.

Cada pata tiene una contera de goma para limitar el movimiento en superficies lisas.

El modelo H6551 es un escalón como el H6550 pero incorpora una barandilla que se mantiene fija mediante las tuercas y tornillos proporcionados en los 4 agujeros situados en la parte inferior de las patas. Durante el montaje asegúrese que las patas curvadas de la barandilla están situadas hacia el exterior de la banqueta.



Seguridad

Asegúrese que el escalón es estable en una superficie plana antes de transferir su peso al escalón. No sobrecargue demasiado el peso hacia los lados o hacia atrás ya que podría perder el equilibrio.

Mantenga ambos pies firmemente en la superficie del escalón.

Cuando utilice el modelo H6551 con barandilla, mantenga una mano en contacto con la barandilla para mantener su equilibrio.



Mantenimiento y limpieza

Los escalones han sido diseñados para un tener mantenimiento mínimo.

Para limpiarlo, limpie con un paño suave, utilice un detergente neutro de uso general y agua tibia con jabón. No utilice abrasivos fuertes.

Compruebe que las conteras de goma no estén agrietadas, desgastadas o sueltas y reemplácelas cuando sea necesario.

Especificaciones

Peso máximo del usuario: 160Kg

Altura del escalón: 23cm

Altura de la barandilla desde el suelo: 104cm

Garantía

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencias a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/ Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

