

# ASIENTO BLANDO PARA SILLA Y BANQUETA PORTOFINO (Ref. A838F)

## MODO DE EMPLEO:

El cojín blando es un accesorio complementario para la banqueta y silla de ducha Portofino. Hace que el asiento sea más cómodo, suave y acogedor. El cojín suave cubre el asiento, protegiéndolo parcialmente de la suciedad y facilita su limpieza. Las propiedades antibacterianas certificadas del material de composición limitan su proliferación, haciendo el uso adecuado para ambientes húmedos y mojados.

El cojín suave se puede colocar y quitar fácilmente del asiento.

## INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

Los productos de ducha de la línea Portofino están dirigidos a personas mayores, usuarios de silla de ruedas, personas con movilidad reducida de lumbares, rodilla o cadera, y a todas aquellas personas que tengan dificultades para mantenerse de pie durante las etapas de ducha de la higiene personal diaria.

El usuario debe tener autonomía de equilibrio durante los procedimientos de sentarse y de ponerse en pie, así como tener la capacidad adecuada para mantenerse sentado.

Bajo la supervisión de un adulto.

## ADVERTENCIAS E INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- No se debe exceder el peso máximo indicado en las instrucciones de montaje.
- Antes de cada uso, asegúrese que el asiento de la ducha esté correctamente ensamblado en una posición estable. Además, asegúrese que el cojín suave esté correctamente enganchado al asiento por el clip de bloqueo provisto y que este último esté completamente enganchado como se muestra en las imágenes mostradas a continuación.
- El asiento de ducha solo se puede utilizar en superficies libres de obstáculos.
- Durante el montaje, respete estrictamente lo que se muestra en el Manual de usuario.
- El riesgo de lesiones en los dedos puede aumentar durante el proceso de montaje.
- No se balancee en el asiento, esto puede provocar resbalones, vuelcos o hundimientos de las piernas. Mantenga siempre el asiento de la ducha sobre sus 4 patas.
- No modifique el asiento de la ducha y sus componentes de ninguna manera.
- No use el asiento de la ducha si está dañado o alterado de alguna manera. Las grietas y deformaciones pueden afectar fuertemente las prestaciones y seguridad del dispositivo.
- Después de su uso, el asiento de la ducha debe retirarse del plato de ducha para evitar cualquier obstrucción.
- No utilice el asiento de la ducha para un propósito diferente al previsto.
- El asiento de ducha y su cojín no deben guardarse al aire libre.

## INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO:

El mantenimiento de los productos consiste en los procedimientos de limpieza y saneamiento. Para garantizar un uso seguro y un estándar adecuado de higiene, el usuario debe realizar estos procedimientos antes de cada uso.

El usuario debe asegurarse de la integridad estructural del dispositivo y sus componentes y, si hay tornillos presentes, debe comprobarse que estén correctamente apretados.

Para los procedimientos de limpieza y saneamiento, siga los pasos a continuación:

1. Deben usarse guantes.
2. Elimine la suciedad evidente antes para proceder con la desinfección más precisa.
3. Utilice agua tibia y un detergente neutro para el procedimiento de limpieza.
4. Limpiar con un paño limpio y seco

El cojín blando debe limpiarse estrictamente a mano.

## REQUISITOS DE REUTILIZACIÓN:

El producto es apto para ser reutilizado por otros usuarios. Antes de ser reutilizado por otros, el producto debe limpiarse y desinfectarse correctamente.


Antes de ser utilizado por otros, el producto debe ser revisado por distribuidores cualificados.

## PROCEDIMIENTO CORRECTO DE ELIMINACIÓN:

No deseche el producto con la basura doméstica normal. Pregunte a su autoridad local de antemano para desecharlo de manera correcta respetando el medio ambiente.

## INFORME DE INCIDENTES:

Si ha habido un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o en el caso con el fabricante de este producto en [info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com).

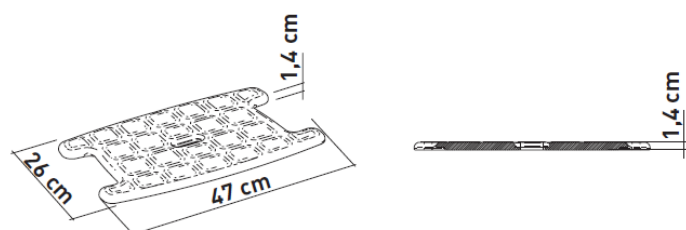

# ASIENTO BLANDO PARA SILLA Y BANQUETA PORTOFINO (Ref. A838F)

