


MANUAL DE USUARIO

**PAR SOPORTES LATERALES
UNIVERSALES TUBO 22 mm.
Ref. PU-SP**

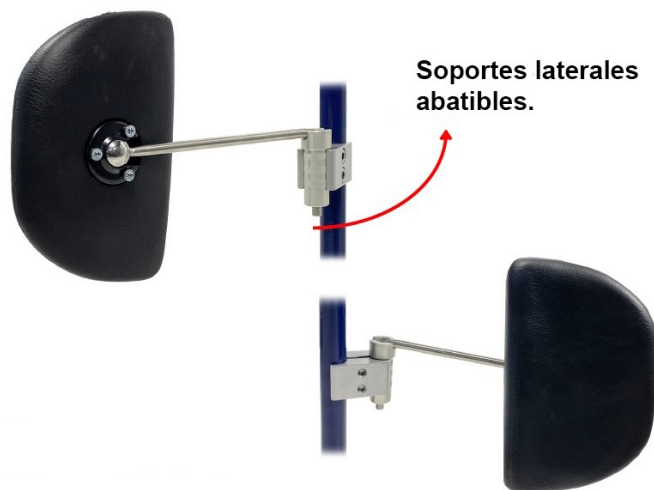

MONTAJE DE LOS SOPORTES LATERALES (OPCIONAL)

Los soportes laterales son un producto que no viene de serie y se deben comprar por separado, según las necesidades y con la prescripción de un especialista.

-Afloje los tornillos Allen de la mordaza y colóquela en los tubos traseros del respaldo de la silla. Antes de fijarlos debe elegir la altura correcta de los soportes laterales laterales. Vuelva a apretar firmemente los dos tornillos Allen. Asegúrese que el soporte está bien sujeto y no se desplaza lateralmente. (foto 1)



-El pad acolchado se puede regular en múltiples posiciones. Para ello afloje ligeramente los 3 tornillos Allen y muévelo hasta que encuentre la posición óptima para el usuario. (foto 2)



-El sistema de soportes laterales permiten abatirlos hacia atrás para facilitar las transferencias del usuario. Tire de la barra hacia arriba i abátalo para atrás. Realice la operación contraria para volverlo a colocar en la posición de uso. (foto 2)