

ASIDEROS Y BARRAS ABATIBLES LIGURIA

(ADA569-30I)	RECTA 30 cm INOXIDABLE PULIDO
(ADA569-30A)	RECTA 30 cm ACERO PINTADO EN BLANCO
(ADA569-45I)	RECTA 45 cm INOXIDABLE PULIDO
(ADA569-45A)	RECTA 45 cm ACERO PINTADO EN BLANCO
(ADA569-60I)	RECTA 60 cm INOXIDABLE PULIDO
(ADA569-60A)	RECTA 60 cm ACERO PINTADO EN BLANCO
(ADA568I)	ANGULADA 45° INOXIDABLE PULIDO
(ADA568A)	ANGULADA 45° ACERO PINTADO EN BLANCO



AyudasDinámicas



2 YEARS
GUARANTEE

USO PREVISTO:

Los asideros de la línea LIGURIA permiten aumentar la independencia al ducharse o al ponerse de pie y sentarse en el inodoro o en la bañera. Funcionan como un asidero robusto y seguro, a la que el usuario puede agarrarse para reducir parte del peso corporal y de las piernas, reduciendo la fatiga muscular debido a la posición de pie, así como los riesgos de resbalones y lesiones. Se puede instalar en diferentes lugares del baño, según las necesidades del usuario.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

Los asideros LIGURIA están dirigidos a personas mayores, usuarios de sillas de ruedas y a todos aquellos que necesitan un mayor apoyo durante el uso del baño. Se requiere que el usuario tenga suficiente habilidad para agarrar firmemente al asidero así como suficiente autonomía.

ADVERTENCIAS E INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- No se debe superar el peso máximo del usuario indicado en las instrucciones de montaje.
- Antes de cada uso, asegúrese de que esté firmemente fijado a la pared.
- Durante el montaje, siga estrictamente lo que se muestra en el manual del usuario.
- No modifique el producto de ninguna manera.
- No use el producto si está dañado o alterado de alguna manera. Las grietas y deformaciones pueden afectar la seguridad del producto.
- No utilice el producto con las manos grasientas. La superficie resbaladiza puede reducir el agarre y provocar una caída.
- No utilice producto para un fin diferente al previsto: no debe utilizarse para sustituir una escalera.
- No debe almacenarse al aire libre.

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO:

El mantenimiento de los productos consiste en los procedimientos de limpieza y saneamiento. Para garantizar un uso seguro y un estándar adecuado de higiene, el usuario debe realizar estos procedimientos antes de cada uso. El usuario debe asegurarse de la integridad estructural del dispositivo y sus componentes, también el apriete de los tornillos debe ser comprobado.

Para los procedimientos de limpieza y saneamiento, siga los pasos a continuación:

1. Se deben usar guantes.
2. Quitar la suciedad evidente antes de proceder a la desinfección.
3. Utilice agua o detergente no agresivo para el procedimiento de limpieza.
4. Limpiar con un paño seco y limpio.

Alternativamente, el producto se puede limpiar en lavavajillas domésticos a la temperatura máxima.

REQUISITOS DE REUTILIZACIÓN:

El producto es apto para su reutilización por otros usuarios. Antes de que otros lo reutilicen, el producto debe limpiarse y desinfectarse correctamente. Antes de la reutilización del producto, el producto debe ser revisado por distribuidores calificados.

PROCEDIMIENTO CORRECTO DE ELIMINACIÓN:

No deseche el producto con la basura doméstica. Pregunte a su autoridad local de antemano para desecharlo de manera correcta respetando el medio ambiente.

INFORME DE INCIDENTES:

Si ha habido un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o en el caso con el fabricante de este producto en info@ayudasdinamicas.com.



