



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO



Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com



ANDADOR DE ALUMINIO TRIAL (AD234)

Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, lea detenidamente el manual del usuario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Andador plegable de aluminio con 4 ruedas delanteras y tacos en la parte trasera. Se puede plegar para su transporte y almacenamiento. Adecuado para uso en interiores y superficies planas.

USO PREVISTO

El andador está diseñado para servir de apoyo a una persona mientras camina.

El peso máximo del usuario es de 100 kg y está especificado en la etiqueta del producto.

Se debe usar en interiores y con superficies planas.

Indicaciones de uso


El producto está diseñado para servir de apoyo y ayudar a las personas con movilidad reducida, con deterioro de la fuerza muscular y/o problemas de equilibrio, que necesiten apoyo adicional mientras caminan.

La capacidad cognitiva y la movilidad del usuario deben ser suficientes para un uso seguro.

Contraindicaciones

El producto no está diseñado para que lo utilicen personas con problemas graves de equilibrio o alteraciones perceptivas funcionales.

ETIQUETAS Y SÍMBOLOS DEL PRODUCTO

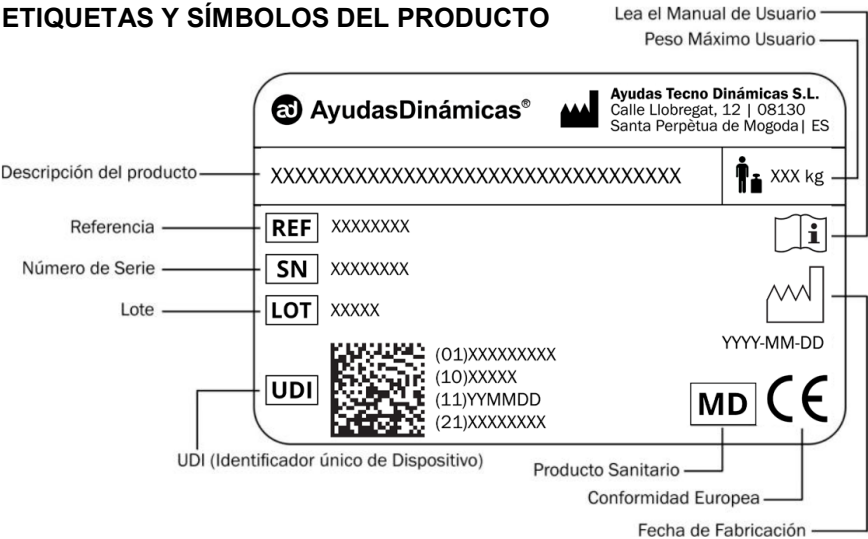

REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto. Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

GARANTÍA

La garantía se extiende según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.

LIMPIEZA

Seguir métodos erróneos o utilizar líquidos de limpieza incorrectos puede dañar o deteriorar el producto.

-Todos los productos de limpieza y desinfectantes empleados deben ser eficaces, compatibles entre sí y deben ser compatibles con los materiales que se van a limpiar.

-Nunca utilice líquidos corrosivos (álcalis, ácidos, etc.) ni productos de limpieza abrasivos.

Recomendamos usar un producto de limpieza doméstico normal, como líquido lavavajillas.

-No utilice disolventes (decapantes de celulosa, acetona, etc.) que cambien la estructura del plástico o disuelvan las etiquetas adheridas.

-Asegúrese siempre de que el producto se ha secado por completo antes de utilizarlo de nuevo.

MANTENIMIENTO

Para garantizar un funcionamiento y una seguridad óptimos, inspeccione el producto periódicamente.

-Compruebe que todos los tornillos y ajustes estén correctamente apretados.

-Asegúrese que las empuñaduras estén apretadas y no presentan holguras.

-Compruebe el estado de los tacos traseros y su desgaste.

-Inspeccione el chasis y las piezas cargadas por si presentan grietas.

-Compruebe si las ruedas están bien ajustadas, desgastadas o dañadas.


-Asegúrese de que las ruedas están libres de pelos u otro tipo de suciedad.

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmonte el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

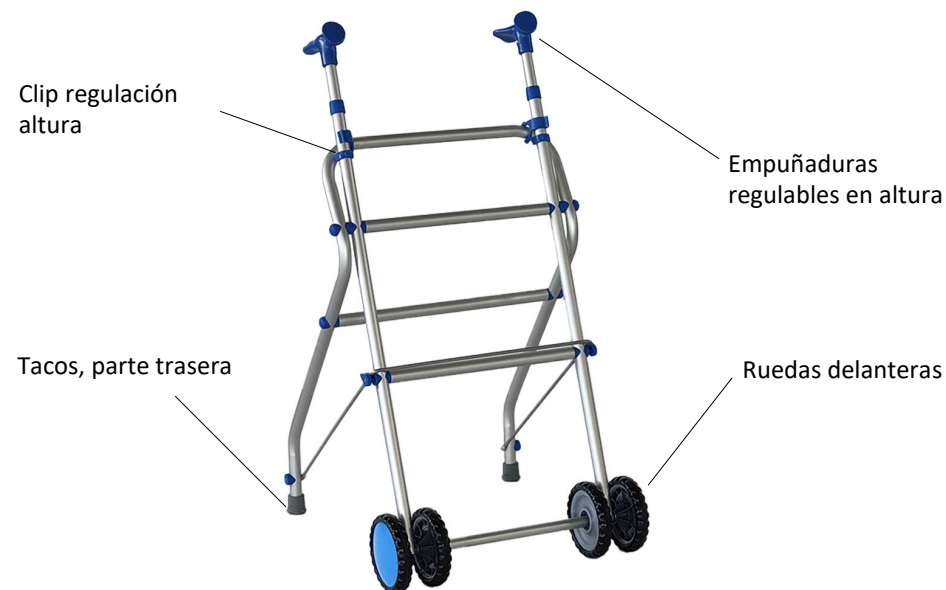

DIMENSIONES Y PESOS

Ancho Total	48 cm
Altura de los puños	De 83 a 89 cm
Longitud Total	54 cm
Diámetro de ruedas	140 mm
Peso Total	2,3 kg
Peso Máximo	100 kg

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

-Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.

-Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto. No utilice el producto si presenta algún defecto.

Ayudas Tecno Dinámicas da por supuesto que un profesional sanitario ha realizado una evaluación individual del usuario para determinar su nivel de riesgo o sus necesidades terapéuticas. Que el vendedor y cuidadores han determinado que proporcionará la ayuda requerida y sus ajustes resultan adecuados para el usuario. También que un profesional sanitario ha formado adecuadamente al cuidador y al usuario sobre la utilización del producto correctamente y de forma segura.

VIDA ÚTIL


La vida útil prevista para este producto es de cinco años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- No lo utilice en escaleras ni en escaleras mecánicas.
- No se ponga de pie sobre el producto.
- Evite los obstáculos que puede encontrar durante la marcha.
- No permita que los niños jueguen con el producto.
- No utilice el andador para transportar personas.
- Tenga cuidado de que las prendas no queden atascadas entre las ruedas.
- No cuelgue ninguna carga, por ejemplo bolsos, en el chasis, las empuñaduras, etc. del andador.
- Los componentes del producto pueden calentarse si se exponen a temperaturas elevadas (superiores a 41 °C). Tenga cuidado si el producto se expone a altas temperaturas, por ejemplo, a la luz solar directa.
- No guarde el producto en entornos mojados o húmedos.
- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto.
- No utilice el producto si está defectuoso.
- No use el andador para ponerse de pie si está sentado.
- Use el andador en interiores y en superficies planas.

DESPLEGADO

Para desplegar el andador. Sujetando de las empuñaduras, apoye los tacos de la parte trasera en el suelo y levante las ruedas delanteras. Empuje hacia delante para que se despliegue.

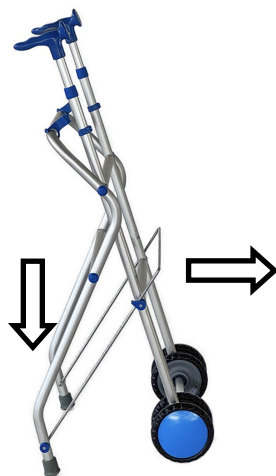


BLOQUEO DE DESPLEGADO

Una vez desplegado el andador, debe accionar el bloqueo de plegado de ambos lados del andador.



Por favor, asegúrese que el sistema de bloqueo está bien anclado al tubo de ambos lados del andador.

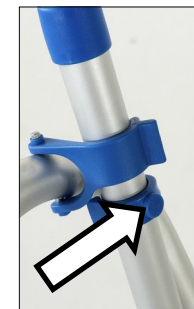

BLOQUEO


PLEGADO

Antes de plegarlo debe desbloquear el sistema de seguridad de plegado.

Para plegar el andador. Sujete de las empuñaduras, apoye los tacos de la parte trasera y pliegue la parte delantera de las ruedas hacia la parte trasera.




Tenga la precaución a la hora de plegarlo de no atraparse los dedos o la mano.

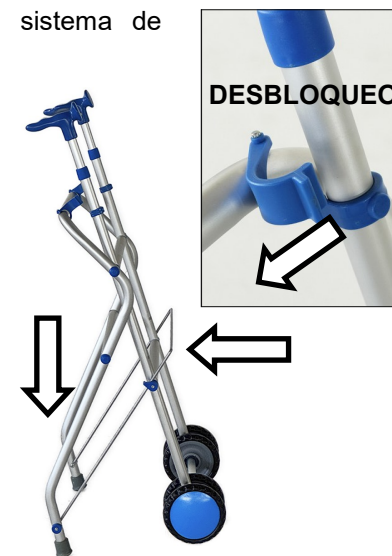

DESBLOQUEO

AJUSTE DE LA REGULACIÓN DE ALTURA DE LAS EMPUÑADURAS

Introduzca el tubo del puño dentro al chasis del andador y fíjelo a la altura deseada. Inserte el clip pasador en el agujero interior del chasis. Repita el mismo procedimiento para el segundo puño asegurándose que ambos estén colocados a la misma altura.

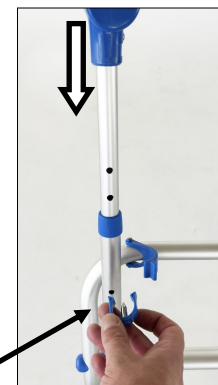

CLIP PASADOR