



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO



Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com



Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, lea detenidamente el manual del usuario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muletas axilares de aluminio plegables y regulables en altura para personas de 140 a 195 cm de altura.

USO PREVISTO

Las muletas axilares están diseñadas como dispositivos de apoyo para facilitar la movilidad de personas con limitaciones temporales o permanentes en los miembros inferiores.


Indicaciones de uso

Su uso está indicado principalmente en casos de lesiones, cirugías, fracturas o condiciones que requieran la descarga parcial o total del peso corporal sobre una o ambas piernas.

Contraindicaciones

- Lesiones o afecciones en la región axilar o torácica, como neuropatías, linfedema, fracturas de costillas o infecciones cutáneas, que podrían agravarse por la presión constante de las muletas.
- Debilidad significativa en los brazos, hombros o manos, lo cual impide el uso seguro de las muletas y puede comprometer la estabilidad del usuario.
- Problemas de equilibrio severo o trastornos neurológicos que dificulten el control del cuerpo al desplazarse con ayuda de muletas.
- Alteraciones cognitivas o del estado mental que limiten la comprensión o el cumplimiento adecuado del uso del dispositivo.
- Edad avanzada o fragilidad extrema, en casos donde el riesgo de caída sea elevado y se recomienda otro tipo de ayuda técnica más estable (como un andador).

ETIQUETAS Y SÍMBOLOS DEL PRODUCTO

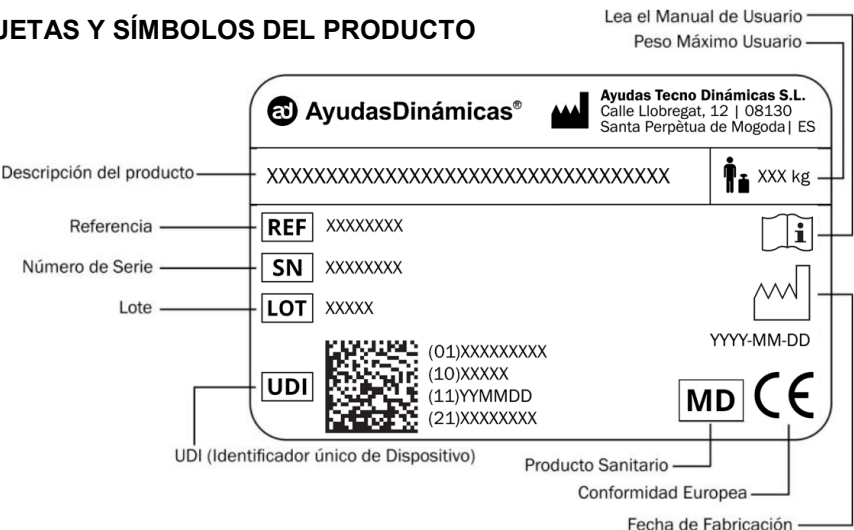

MANTENIMIENTO

Para garantizar un funcionamiento y una seguridad óptimos, inspeccione el producto periódicamente.

- Compruebe que todos los tornillos y ajustes estén correctamente apretados.
- Asegúrese que las empuñaduras estén apretadas y no presentan holguras.
- Compruebe el estado de los tacos y su desgaste.
- Inspeccione la estructura por si presentan grietas.

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmante el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto. Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

GARANTÍA

La garantía se extiende según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.

- 5- Inserte la pata con la contera en la parte inferior de la muleta.
- 6- Ajuste la altura de la parte superior e inferior utilizando los botones de ajuste.



LIMPIEZA

Seguir métodos erróneos o utilizar líquidos de limpieza incorrectos puede dañar o deteriorar el producto.

- Todos los productos de limpieza y desinfectantes empleados deben ser eficaces, compatibles entre sí y deben ser compatibles con los materiales que se van a limpiar.
- Nunca utilice líquidos corrosivos (álcalis, ácidos, etc.) ni productos de limpieza abrasivos.

Recomendamos usar un producto de limpieza doméstico normal, como líquido lavavajillas.

- No utilice disolventes (decapantes de celulosa, acetona, etc.) que cambien la estructura del plástico o disuelvan las etiquetas adheridas.
- Asegúrese siempre de que el producto se ha secado por completo antes de utilizarlo de nuevo.



DIMENSIONES Y PESOS

Altura de axila a suelo	100 a 150 cm
Altura de la persona	140 a 195 cm
Peso Total	2,3 kg
Peso Máximo	130 kg

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

-Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.

-Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto. No utilice el producto si presenta algún defecto.

Ayudas Tecno Dinámicas da por supuesto que un profesional sanitario ha realizado una evaluación individual del usuario para determinar su nivel de riesgo o sus necesidades terapéuticas. Que el vendedor y cuidadores han determinado que proporcionará la ayuda requerida y sus ajustes resultan adecuados para el usuario. También que un profesional sanitario ha formado adecuadamente al cuidador y al usuario sobre la utilización del producto correctamente y de forma segura.

VIDA ÚTIL

La vida útil prevista para este producto es de cinco años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Ajuste adecuado:

Las muletas deben ser ajustadas a la altura correcta. La parte superior debe quedar entre 2 y 3 centímetros por debajo de la axila cuando el usuario está de pie, y las empuñaduras deben estar a la altura de la cadera, permitiendo una ligera flexión del codo (aproximadamente 20° a 30°) al sostenerlas.

Evitar apoyo en la axila:

No se debe apoyar el peso corporal directamente sobre las axilas, ya que esto puede causar compresión de nervios y vasos sanguíneos (como el nervio braquial), lo que puede llevar a entumecimiento, debilidad o dolor. El peso debe distribuirse a través de los brazos y manos.

Superficies seguras:

Evitar caminar sobre superficies resbaladizas, desiguales o mal iluminadas. Comprobar que las conteras (puntas de goma) estén en buen estado para asegurar tracción y evitar deslizamientos.

Revisión periódica del equipo:

Verificar regularmente el estado de las muletas, incluyendo la integridad de las empuñaduras, almohadillas axilares y puntas de goma. Reemplazar cualquier componente desgastado o dañado.

Entrenamiento previo:

El usuario debe recibir instrucción por parte de un profesional de la salud (fisioterapeuta o médico) para aprender la técnica correcta de marcha con muletas, incluyendo subir y bajar escaleras.

Evitar el uso prolongado sin supervisión:

El uso continuo y sin seguimiento médico puede derivar en problemas posturales, sobrecarga muscular o nerviosa, y complicaciones articulares.

No usar como herramienta de carga o apoyo inadecuado:

Las muletas están diseñadas exclusivamente para facilitar la movilidad, no deben utilizarse para empujar, levantar objetos o como soporte para actividades distintas de caminar.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1- Presione el botón de ajuste de la pata hasta escuchar un “clic”.
- 2- Gire y tire de la pata hacia abajo (2a) para retirar la pata de la muleta (2b).



- 3- Despliegue la parte inferior hasta que las dos secciones encajen en su lugar.
- 4- Presione el botón de ajuste para bloquear ambas partes.

