
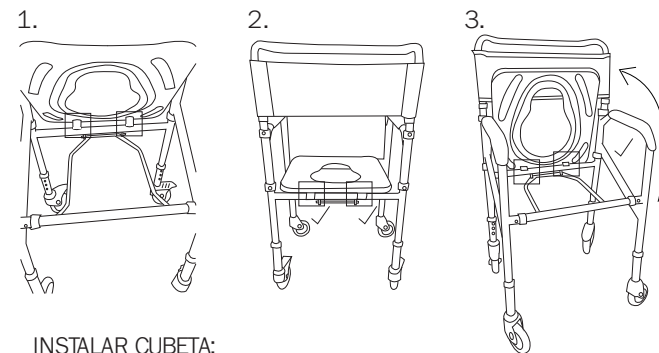
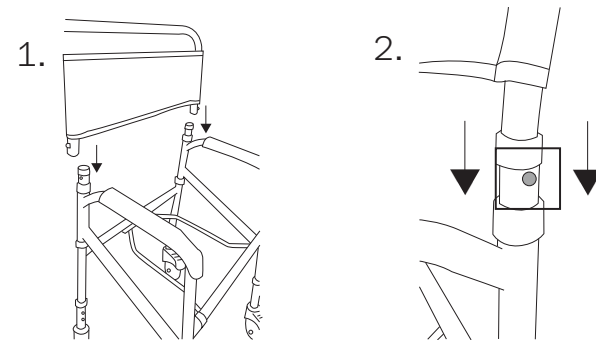
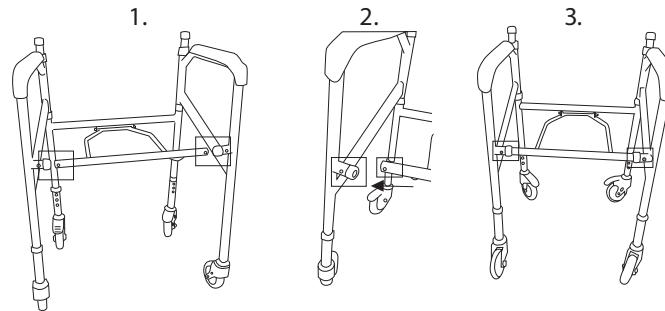
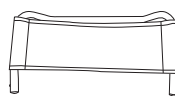
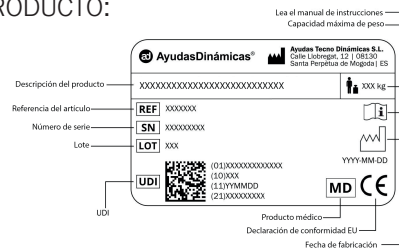
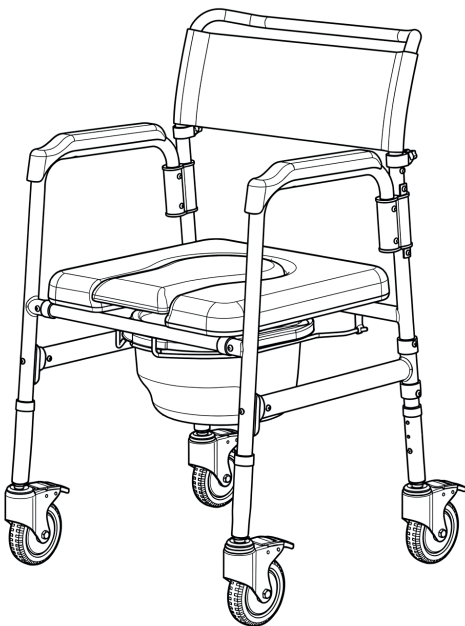


GRADUACIÓN DE ALTURA

La silla de ducha y WC cuenta con dos puntos de graduación para la altura entre el asiento.

Para ajustar la altura, presione uno a uno los pines de seguridad y asegúrelos en la orificio de la altura deseada. Repita el procedimiento en cada una de las tres patas restantes, asegurándose que cada uno de los pines de seguridad estan asegurados en el mismo punto de altura. No asegurar cada una de las patas en el mismo punto de altura genera inestabilidad en el dispositivo, lo cual podría causar un evento adverso al usuario. Antes de usar el cómodo sanitario verifique que cada una de las patas está al mismo nivel y cada una de ellas está en contacto con el suelo.

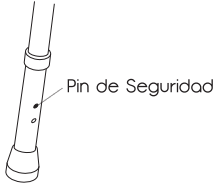

USO Y PRECAUCIONES

- Antes de usar el la silla de ducha y WC, verifique que todos los pines de seguridad mencionados en el proceso de montaje estén correctamente asegurados
 - Verifique que todas las ruedas están en contacto con el suelo, si evidencia una rueda que no esté en contacto, cerciórese de que el pin de ajuste de altura está en el mismo punto que los demás. Si al hacer la corrección el problema persiste, evite el uso del dispositivo.
 - La silla de ducha y WC cuenta con freno en sus ruedas, al momento de usarla, debe verificarse que el freno esté accionado para evitar el riesgo de lesiones y caídas.
 - Este dispositivo en principio está diseñado como silla para ducha.
- En caso de realizar la ducha de un usuario, se recomienda secar completamente todo el producto, retirar las patas y dejarlas a la inversa para que el agua no se acumule alrededor del tornillo que une la pata con la rueda.
- Si el uso de la silla para ducha es recurrente, se deben realizar inspecciones y mantenimientos preventivos con mayor frecuencia, enfocándose en revisar las ruedas, ajuste y estado del tornillo de unión de la rueda a la pata, remaches y pines de seguridad.
 - El producto puede usarse sobre un inodoro si el tamaño del sanitario permite ingresar la silla por encima del mismo. En tal caso, asegúrese de retirar la cubeta.
 - La silla de ducha y WC debe ser almacenada en interiores, en espacios frescos y sin incidencia directa del sol.

Precauciones:

- Las ruedas se incluyen en la silla de ducha y WC para facilitar la movilidad del mismo sin requerir levantarlo del suelo para transportarlo.
- Las ruedas de la silla de ducha y WC no convierten este dispositivo en una silla de transporte, por lo cual solo está recomendado el traslado del usuario en trayectos cortos (p.e. cama-baño-cama o sala-baño-sala). Tenga en cuenta que en estos trayectos, el usuario deberá ir con los pies suspendidos en el aire para disminuir el riesgo de caídas o lesiones.
- Evite usar la silla de ducha y WC como silla de descanso, el usuario solo debe permanecer en el dispositivo mientras realiza las actividades para las cuales está diseñado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Realice la limpieza de la cubeta posterior cada uso del dispositivo
- Para realizar la limpieza de la silla de ducha y WC puede usar un jabón neutro diluido (evite el uso de elementos e insumos abrasivos y corrosivos). Evite verter líquido directamente al dispositivo ya que puede ingresar agua al interior y deteriorar el material, use un paño ligeramente humedecido con la dilución de jabón y repase las superficies del dispositivo. Con un nuevo paño seco, remueva los restos de la dilución.
- Verifique periódicamente la silla de ducha y WC, antes de cada uso haga un chequeo de los pines de seguridad y el ajuste de las ruedas, si evidencia un desajuste, asegúrese de ajustar nuevamente antes de hacer uso del dispositivo.
- Verifique periódicamente el estado de los frenos de las ruedas, si al accionar el freno nota que la rueda sigue girando, evite el uso del dispositivo y reemplace la rueda.
- Se recomienda por lo menos cada 1 mes hacer una revisión general en la que se tengan en cuenta los siguientes puntos:

- o Estado de los frenos de las ruedas
- o Ajuste de las ruedas a las patas
- o Lubricación de los rodamientos de las ruedas
- o Estado de los pines de seguridad
- o Verificación de rastros de humedad y aparición de óxido
- o Estado del asiento
- o Estado del espaldar
- o Estado de los remaches
- o Asegúrese que los pines de seguridad de ajuste en altura salgan completamente por los orificios respectivos para cada extensión de la base. Esto asegurará que las extensiones de las bases estén bloquea dos de manera segura en sus posición y que tenga una altura uniforme.
- o Asegúrese que TODOS los tornillos estén ajustados.
- o Verifique que los tapones de plástico o ruedas de las extensiones de las bases no estén rotos, desgastados o ausentes.

- Reemplace inmediatamente cualquier tapón, o rueda, o reemplácelos todos si tienen imperfecciones.
- o Todos los cuatro tapones o ruedas de las bases DEBEN tocar el suelo simultáneamente en todo momento.
- o Este dispositivo NO debe ser usado como silla para transporte de personas.

NOTA: Si la silla de ducha y WC ha llegado a ser usado como silla para ducha, se recomienda reducir el tiempo entre mantenimientos.

Especificaciones Técnicas

Referencia	AD806
Profundidad	43 CM
Peso Neto	5,1 Kg
Capacidad de Peso	100 Kg
Ancho del asiento	43 CM
Material	Aluminio
Tipo de Estructura	Plegable
Tipo de Apoyo	Ruedas de 4"
Altura del asiento al piso	48,5 - 51 Cm
Altura total	93 - 95,5 Cm
Altura respaldo	39 CM
Altura de apoyabrazos	24 CM

GARANTIA

La garantía se rige por la legislación vigente en materia de garantías y cubre los defectos de materiales y de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los daños derivados del desgaste natural, así como los ocasionados por un uso indebido del producto.

Si requiere una reparación, póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el producto. A través de este, el fabricante le proporcionará el soporte correspondiente en el marco de la garantía.



Grupo de productos: Sillas de ducha con ruedas
Referencia del producto: AD806
Manual de instrucciones 1.1.0 ES
Edición: 03/2026

