

AD501

Reposabrazos auxiliares



¡Advertencias!

Lea y siga atentamente estas instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

1. USO PREVISTO

Los reposabrazos auxiliares incorporadores se han diseñado para aportar soporte y estabilidad adicionales durante el uso del WC y ayudar a los usuarios con movilidad reducida a incorporarse.

2. SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No supere el peso máximo de usuario del producto con el que se utilice este producto. Se recomienda que la instalación sea realizada por personal cualificado y competente.

3. DESMONTAJE

Retire el embalaje y compruebe cuidadosamente todas las piezas. Si faltan piezas o están dañadas, contacte inmediatamente con su proveedor y no intente realizar el montaje.


4. MONTAJE

Nota: Todas las imágenes se muestran únicamente a efectos ilustrativos. El producto real puede variar según la gama/modelo.

Instale el producto únicamente en una zona donde la superficie de montaje y el soporte (sustrato) sean estructuralmente resistentes.

4.1. Montaje de las patas

Retire los 4 clips tipo “c” y, a continuación, extraiga las patas del bastidor.

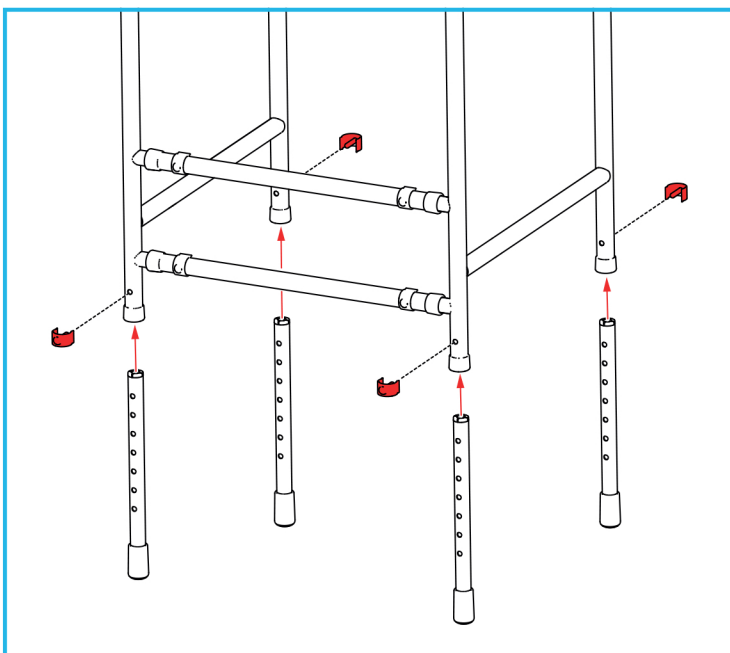

Capacidad máxima del usuario



4.2. Montaje del clip en C y ajuste de altura

Introduzca las patas en el marco para inodoro. Deslice las patas hasta que el marco quede a la altura necesaria para su uso. Y ajuste el clip en C para fijar la altura.

4. MANTENIMIENTO

Compruebe periódicamente señales de óxido o desgaste evidente. Importante que el clip “C” siempre este bien fijado.

Limpie el producto con regularidad utilizando un detergente neutro de uso general y agua templada. Compruebe la idoneidad de los productos de limpieza antes de utilizarlos.

No utilice limpiadores ni paños abrasivos, ya que podrían dañar permanentemente la superficie e invalidar la garantía.

Para desinfectar, pase un paño humedecido con una solución de lejía diluida y aclare a continuación con abundante agua limpia.

Deje que el producto se seque completamente antes de su uso o almacenamiento.

5. ELIMINACION

El producto está fabricado en metal y puede desecharse a través de los puntos limpios municipales (centros de recogida de residuos domésticos y reciclaje) o mediante gestores

6. GARANTIA

La garantía se extiende según la ley vigente de garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido. En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.