



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO



SILLA CON RUEDAS PARA DUCHA Y WC **SIENA**

Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, léalo detenidamente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Silla de ruedas para la ducha y el wc. Reposabrazos y reposapiés fijos. Fabricada en aluminio. Ruedas de 125mm. , las traseras con frenos.

USO PREVISTO

Este producto se ha diseñado para utilizarse como ayuda en la ducha y el wc, al proporcionar una posición de asiento estable. Está destinado a usuarios adultos y adolescentes con movilidad reducida o limitada (por ejemplo: piernas y/o caderas). Si se utiliza sin un ayudante, el usuario debe ser capaz de mantener el equilibrio.

El producto se ha diseñado exclusivamente para un uso doméstico y no está diseñado para un uso intensivo en centros asistenciales.

El peso máximo del usuario es de 100 kg

Indicaciones de uso


Movilidad restringida o limitada (p. ej.: piernas y/o caderas) o tener problemas de equilibrio para ponerse en pie o caminar debido a discapacidades transitorias o permanentes.

Contraindicaciones

El uso de la silla es inadecuado en caso de:

Severo desequilibrio, pérdida de ambos miembros superiores, contracturas/daños en articulación de ambos brazos, incapacidad de sentarse o vista inadecuada o dañada.

ETIQUETAS Y SÍMBOLOS DEL PRODUCTO

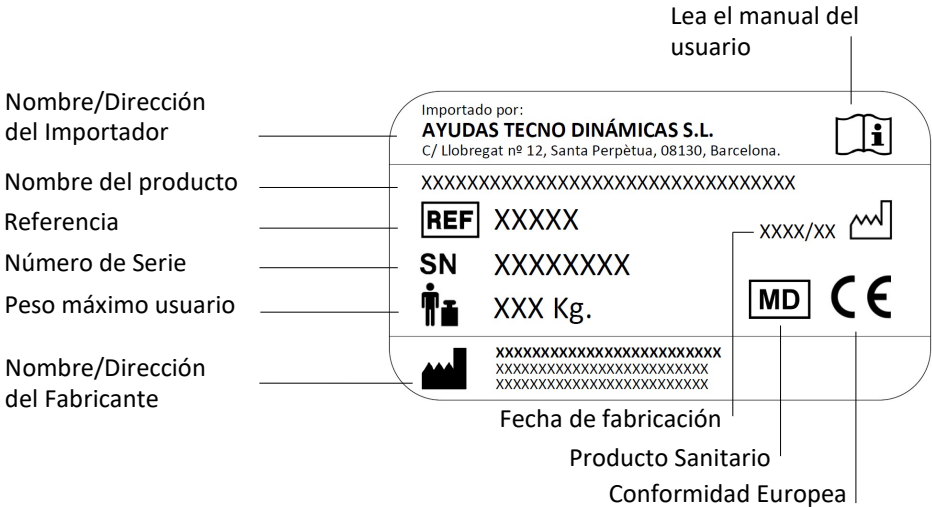

VIDA ÚTIL

La vida útil prevista para este producto es de tres años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Por favor, lea todas las advertencias de seguridad:

Riesgo de daños o lesiones graves

Un uso incorrecto de este producto puede provocar lesiones o daños.

- Si tiene alguna duda relacionada con las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional sanitario o con su proveedor antes de intentar utilizar este equipo.
- No utilice este producto ni cualquier otro equipo opcional disponible sin antes haber leído y comprendido estas instrucciones y cualquier otro material informativo adicional, como el manual del usuario, manuales de servicio u hojas de instrucciones proporcionados con este producto o equipo opcional.

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de caída

- No utilice el producto si está defectuoso.
- No realice modificaciones ni alteraciones no autorizadas en el producto.
- No ponerse de pie sobre este producto.
- No se ponga de pie sobre el reposapiés.
- No lo utilice como ayuda para escalar.
- No levante la silla del reposabrazos/reposapiés.
- Usar solo en una superficie plana.
- No utilice ni almacene el producto en exteriores.

¡ADVERTENCIA!

- Antes de utilizarlo por primera vez, limpie a fondo el producto.
- Antes de cada uso, compruebe que el producto no esté dañado y asegúrese de que esté montado de forma segura.

¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de lesiones


El uso de piezas incorrectas o que no sean originales puede afectar el funcionamiento y la seguridad del producto.

- Utilice solo piezas originales para usar el producto.

CONTENIDO DE LA ENTREGA

En primer lugar, compruebe que usted recibe los siguientes componentes en la caja:

- Laterales con ruedas (x2 unidades) **A**
- Arco trasero (x1 unidad) **B**
- Arco delantero (x1 unidad) **C**
- Tubo respaldo (x1 unidad) **D**
- Asiento acolchado (x1 unidad) **E**
- Lona respaldo (x1 unidad) **F**
- Bolsa tornillería ensamble (x1 unidad)

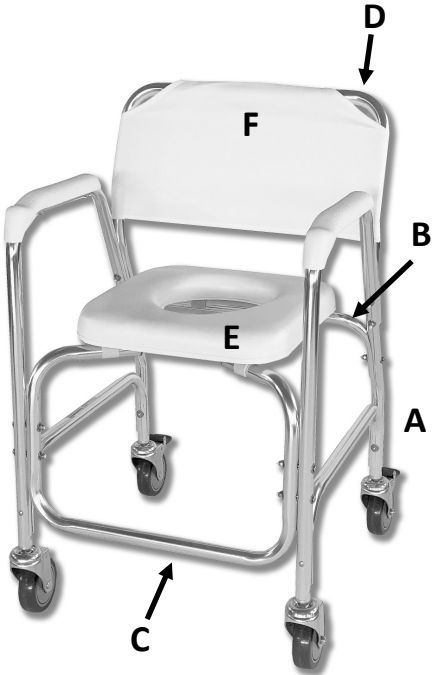

DATOS TÉCNICOS

ANCHO ASIENTO	40 cm.
FONDO ASIENTO	40 cm.
ALTO ASIENTO	52 cm.
ANCHO TOTAL	58 cm.
ALTURA DEL RESPALDO	40 cm.
FONDO TOTAL	64 cm.
ALTO TOTAL	88 cm.
PESO MÁXIMO	100 Kg.

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso 1

Coloque la parte frontal entre las partes laterales. Inserte 4 tornillos (6), 4 arandelas (7), 4 tuercas hexagonales (9).


Todavía no los apriete del todo.



Paso 2

Inserte las abrazaderas (x 2) en la barra trasera. Coloque la barra trasera entre las partes laterales. Inserte 2 tornillos (8), 2 arandelas (7), 2 tuercas hexagonales (9).

Todavía no los apriete del todo.

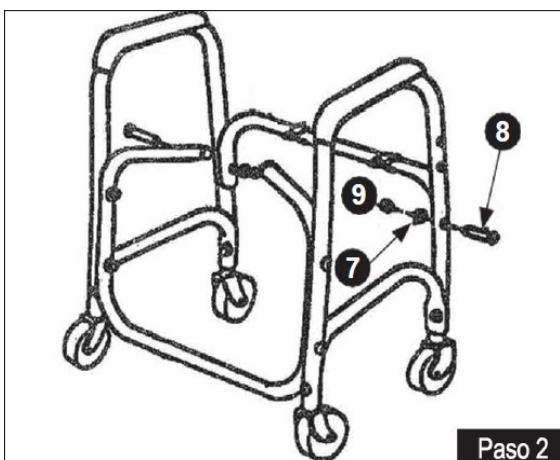

Paso 3

Coloque el respaldo en la parte superior trasera de los laterales. Inserte 4 tornillos (6), 4 arandelas (7), 4 tuercas hexagonales (9).

Todavía no los apriete del todo.




Paso 4

Apriete bien los tornillos anteriormente montados (parte A, B y C).

Coloque el asiento tapizado en el chasis.

Inserte la lona del respaldo en el tubo trasero de la silla.

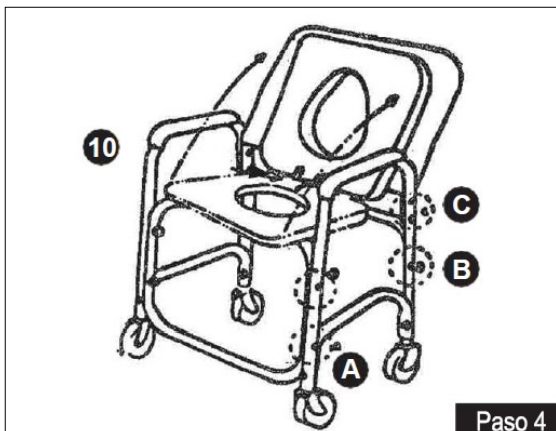

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Revise periódicamente el apriete de los tornillos de la estructura de la silla de ducha. Es importante verificar el estado de las ruedas, que giren correctamente y que los frenos realicen su función.

Limpieza

Seguir métodos erróneos o utilizar fluidos incorrectos puede dañar o deteriorar el producto.

- Todos los productos de limpieza y desinfectantes empleados deben ser eficaces, compatibles entre sí y deben proteger los materiales que se van a limpiar.
- Nunca utilice fluidos corrosivos (álcalis, ácidos, etc.) ni productos de limpieza abrasivos. Recomendamos usar un producto de limpieza doméstico normal, como líquido lavavajillas, si no especifica lo contrario en las instrucciones de limpieza.
- No utilice disolventes (decapantes de celulosa, acetona, etc.) que cambien la estructura del plástico o disuelvan las etiquetas adheridas.
- Asegúrese siempre de que el producto **se ha secado** por completo antes de utilizarlo de nuevo.

IMPORTANTE

La limpieza y la desinfección habituales mejoran el correcto funcionamiento, aumentan la vida útil y evitan la contaminación.

Limpie y desinfecte el producto

- periódicamente mientras esté en uso,
- antes y después de cualquier procedimiento de mantenimiento,
- cuando haya estado en contacto con fluidos corporales,
- antes de usarlo con un nuevo usuario.

IMPORTANTE

- Limpie el producto a mano
- Temperatura de limpieza máxima 60 °C

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmante el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

INFORME DE INCIDENTES:

Si ha habido un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o en el caso con el fabricante de este producto en info@ayudasdinamicas.com.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.

Importado por:

Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com

