



AyudasDinámicas

MANUAL DE USUARIO AD905



COMPROBACION ENTREGA

Antes que nada compruebe que Vd. recibe las siguientes partes en la caja:

- 12 tornillos largos + 12 tuercas ciegas
- 4 tornillos cortos + 4 tuercas ciegas + 4 arandelas pequeñas
- 2 tornillos curvados especiales + 2 tuercas grandes + 2 arandelas grandes
- Una cubeta de plástico con tapa
- 2 laterales de tubo de aluminio con respaldos ya montados
- 2 tubos de aluminio en forma de U
- 1 tubo de aluminio en forma de U
- 2 piezas planas de aluminio y en forma de boomerang

MONTAJE

Figura 1

Con 8 tornillos largos y sus 8 tuercas monte el chasis según la figura 1. Tenga en cuenta que el tubo de aluminio en forma de U que lleva 4 agujeros (en lugar de solamente dos) debe ir montado en la parte trasera.

NO apriete las tuercas y los tornillos todavía.



Figura 2

Con los 4 tornillos cortos, las 4 arandelas pequeñas y las 4 tuercas ciegas coloque las dos varillas curvadas en forma de boomerang como muestra la figura 2. Observe que la abertura debe ser mayor por la parte delantera y que los orificios de mayor diámetro del tubo trasero deben quedar libres. Puede apretar ahora estos tornillos y tuercas.



Apriete ahora TODOS los tornillos y tuercas de la silla.

Figura 3

Coloque ahora el respaldo con los 4 tornillos y tuercas ciegas que aún le quedan. Observe que el respaldo debe quedar inclinado hacia atrás!

Apriete ahora los tornillos y tuercas de toda la silla.



Figura 4

Solo le falta colocar las tapas de plástico de WC. Primero meta los tornillos especiales en forma de P tal y como muestra la figura 4 para montar las tapas de WC.

Al montarlas sobre la silla tenga en cuenta que las tapas de WC deben ir por dentro del respaldo y no por fuera.

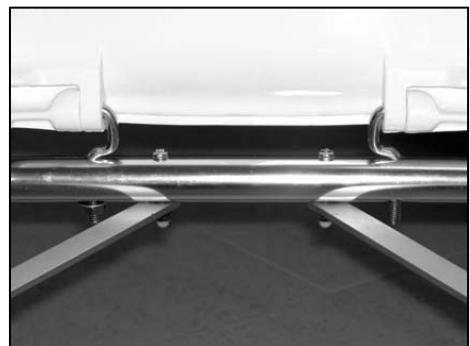


Figura 5

Ahora solo le queda regular las patas telescópicas a su gusto, y poner la cubeta-orinal en su lugar.



Garantía

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com