



# Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO

AD901



## DESCRIPCIÓN

Silla de WC con diversas utilidades. Para estar en la habitación junto a la cama, ya que lleva una cubeta orinal con asa, o bien se puede utilizar directamente sobre la taza del WC como elevador.

Incorpora unos reposabrazos que le sirven de ayuda para incorporarse además de ser abatibles para facilitar las transferencias laterales.

La silla es graduable en altura para adaptarse al usuario.

## AJUSTES

La silla de servicio viene totalmente montada exceptuando la barra trasera que aguanta la tapa de la silla. Para colocar la barra trasera simplemente debe insertarla en los tubos posteriores de la silla situados debajo del asiento hasta oír un “clic” y quede encajada.



Para subir los reposabrazos simplemente levántelo hasta que oiga un “clic”.

Para bajarlos apriete el botón situado en la parte inferior del reposabrazos.



Para extraer la cubeta suba las tapas de la silla y extráigala hacia arriba. Una vez limpia vuélvala a colocar.



Para regular las patas presione el pivote de la pata hacia dentro y colóquelo a la altura deseada, una vez colocado encaje el pivote en el agujero hasta oír un “clic”.

Asegúrese que las cuatro patas están reguladas a la misma altura.



## LIMPIEZA

Para limpiar la silla de servicio utilice agua jabonosa. Una vez limpia séquela con un paño suave.

## **GARANTÍA**

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:

**Ayudas Dinámicas**

C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75

[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)

[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)