



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO

AD917



DESCRIPCIÓN

Silla de WC con acolchado blando especialmente recomendada para aquellos que deben permanecer sentados durante largos periodos.

Es una silla cómoda y fácil de limpiar, de diseño discreto y sobrio que combina fácilmente con el entorno de la casa.

Tiene una tapa que esconde el orificio del WC cuando está fuera de uso.

MONTAJE Y LIMPIEZA

Normalmente encontrará la silla montada completamente, en el caso de recibir la silla sin patas solo deberá montarlas colocándolas en la estructura de la silla. Las patas son regulables en altura mediante pivotes.

Limpie la silla con un trapo húmedo. Limpie la cubeta, después de vaciarla, con agua y jabón.

MEDIDAS

Ancho	69cm
Altura asiento	de 52 a 62cm
Fondo	50cm
Ancho e/brazos	64cm
Medidas asiento	45 x 45cm
Peso total	8,3kg
Peso máx.	100kg

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:

Ayudas Dinámicas

c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA

08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA

tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com

www.ayudasdinamicas.com



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO

AD917



DESCRIPCIÓN

Silla de WC con acolchado blando especialmente recomendada para aquellos que deben permanecer sentados durante largos periodos.

Es una silla cómoda y fácil de limpiar, de diseño discreto y sobrio que combina fácilmente con el entorno de la casa.

Tiene una tapa que esconde el orificio del WC cuando está fuera de uso.

MONTAJE Y LIMPIEZA

Normalmente encontrará la silla montada completamente, en el caso de recibir la silla sin patas solo deberá montarlas colocándolas en la estructura de la silla. Las patas son regulables en altura mediante pivotes.

Limpie la silla con un trapo húmedo. Limpie la cubeta, después de vaciarla, con agua y jabón.

MEDIDAS

Ancho	69cm
Altura asiento	de 52 a 62cm
Fondo	50cm
Ancho e/brazos	64cm
Medidas asiento	45 x 45cm
Peso total	8,3kg
Peso máx.	100kg

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:

Ayudas Dinámicas

c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA

08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA

tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com

www.ayudasdinamicas.com