

## ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmantele el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

## GARANTÍA

La garantía se extiende según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



**Ayudas Tecno Dinámicas S.L.**

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com



Versión 1. (03/2023)



# Ayudas Dinámicas

## MANUAL DE USUARIO



ROLLATOR EXTRA MANIOBRABLE **DELTA** (Ref. AD240)

Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, lea detenidamente el manual del usuario.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rollator de 3 ruedas, la delantera es giratoria y las dos traseras con freno para ralentizar y bloquearlas. Incorpora bolsa. Se puede plegar para su transporte y almacenamiento. Adecuado para uso tanto en interiores como exteriores.

## USO PREVISTO

El rollator está diseñado para servir de apoyo a una persona mientras camina.

El peso máximo del usuario es de 100 kg y está especificado en la etiqueta del producto.

## Indicaciones de uso

El producto está diseñado para servir de apoyo y ayudar a las personas con movilidad reducida, con deterioro de la fuerza muscular y/o problemas de equilibrio, que necesiten apoyo adicional mientras caminan.

La capacidad cognitiva y la movilidad del usuario deben ser suficientes para un uso seguro.

## Contraindicaciones

El producto no está diseñado para que lo utilicen personas con problemas graves de equilibrio o alteraciones perceptivas funcionales.

## REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

## REGULACIÓN ALTURA DE LOS PUÑOS

Regule la empuñadura a la altura adecuada para el usuario. Pase los tornillos suministrados de dentro hacia afuera del rollator, de manera que el pomo quede en la parte exterior y apriételo firmemente.

**NOTA:** Asegúrese que ambos pomos de regulación de altura estén completamente ajustados y que los puños estén regulados a la misma altura. Compruebe la estabilidad antes de apoyar todo el peso en las empuñaduras.



## LIMPIEZA

Seguir métodos erróneos o utilizar líquidos de limpieza incorrectos puede dañar o deteriorar el producto.

-Todos los productos de limpieza y desinfectantes empleados deben ser eficaces, compatibles entre sí y deben ser compatibles con los materiales que se van a limpiar.

-Nunca utilice líquidos corrosivos (álcalis, ácidos, etc.) ni productos de limpieza abrasivos.

Recomendamos usar un producto de limpieza doméstico normal, como líquido lavavajillas.

-No utilice disolventes (decapantes de celulosa, acetona, etc.) que cambien la estructura del plástico o disuelvan las etiquetas adheridas.

-Asegúrese siempre de que el producto se ha secado por completo antes de utilizarlo de nuevo.

## MANTENIMIENTO

Para garantizar un funcionamiento y una seguridad óptimos, inspeccione el producto periódicamente.

-Compruebe que todos los tornillos y ajustes estén correctamente apretados.

-Asegúrese que las empuñaduras estén apretadas y no presentan holguras.

-Compruebe el correcto funcionamiento de los frenos.

-Inspeccione el chasis y las piezas cargadas por si presentan grietas.

-Compruebe si las ruedas están bien ajustadas, desgastadas o dañadas.


-Asegúrese de que las ruedas están libres de pelos u otro tipo de suciedad.

## REGULACIÓN DE PRESIÓN DE LOS FRENOS

El freno se puede ajustar tanto mediante la empuñadura A o en la mitad del cable del freno B.


### REGULACIÓN A (Empuñadura)

Se puede regular la presión necesaria para frenar girando la tuerca graficada (1) mientras se sujeta la tuerca hexagonal (2) que tiene justo al lado. Girando la tuerca grafilado al contrario de las agujas del reloj se aumenta la presión necesaria para frenar.

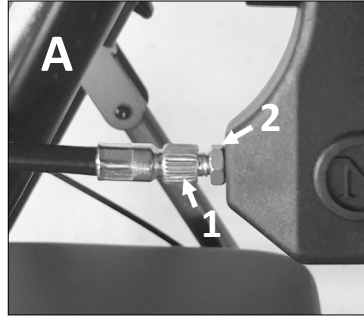

### REGULACIÓN B (Mitad del cable)

En la mitad del cable del freno hay el mismo sistema que le permite tensar o destensar el freno. Gire la tuerca (3), en el sentido correspondiente según quiera tensar o aflojar el freno, mientras sujeta la tuerca (4).

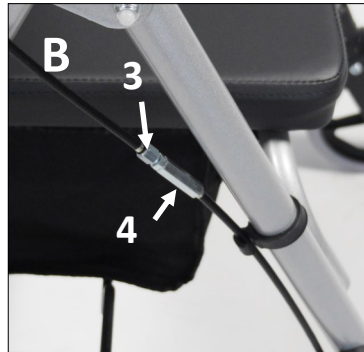

- El ajuste del freno solo debe realizarlo personal cualificado.
- Los frenos regulados para funcionar solo con una ligera presión, serán menos efectivos a la hora de frenar el rollator con peso.

Maneta de freno

Pomo regulación altura

Ruedas traseras con freno


Bloqueo de plegado

Bolsa

Rueda delantera direccional

## DIMENSIONES Y PESOS

(A) Anchura Total	64 cm
(B) Altura Total	De 83 a 96 cm
Longitud Total	57 cm
Diámetro de ruedas	200 mm
Peso Total	6 kg
Peso Máximo	100 kg

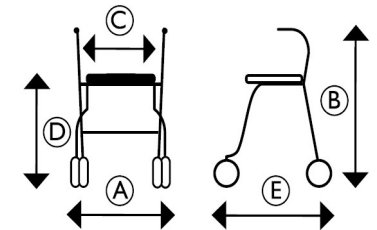

## ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto. No utilice el producto si presenta algún defecto.

Ayudas Tecno Dinámicas da por supuesto que un profesional sanitario ha realizado una evaluación individual del usuario para determinar su nivel de riesgo o sus necesidades terapéuticas. Que el vendedor y cuidadores han determinado que proporcionará la ayuda requerida y sus ajustes resultan adecuados para el usuario. También que un profesional sanitario ha formado adecuadamente al cuidador y al usuario sobre la utilización del producto correctamente y de forma segura.

## VIDA ÚTIL


La vida útil prevista para este producto es de cinco años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.


## INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- No lo utilice en escaleras ni en escaleras mecánicas.
- No se ponga de pie sobre el producto.
- Tenga cuidado al caminar por superficies inclinadas, suelos resbaladizos o superficies irregulares.
- Evite los obstáculos que puede encontrar durante la marcha.
- No permita que los niños jueguen con el producto.
- No utilice el andador para transportar personas.
- Tenga cuidado de que las prendas no queden atascadas entre las ruedas.
- No cuelgue ninguna carga, por ejemplo bolsos, en el chasis, las empuñaduras, etc. del andador.
- Los componentes del producto pueden calentarse si se exponen a temperaturas elevadas (superiores a 41 °C). Tenga cuidado si el producto se expone a altas temperaturas, por ejemplo, a la luz solar directa.
- No guarde el producto en entornos mojados o húmedos.
- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto.
- No utilice el producto si está defectuoso.
- No use el andador para ponerse de pie si está sentado.

## DESPLEGADO Y PLEGADO


Para abrir el caminador, sujete ambos puños y sepárelos. Para asegurar que el caminador quede totalmente abierto empuje el mecanismo de bloqueo, para que el caminador quede bloqueado en la posición abierta (A).

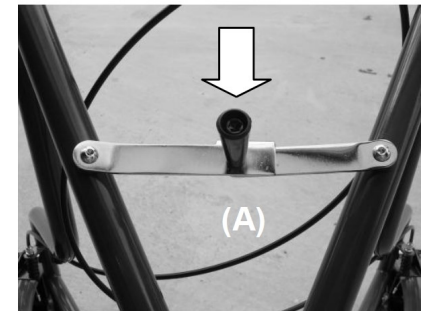

 Por favor, asegúrese que el rollator esté completamente abierto y no se pliega antes de utilizarlo.

Para plegar el caminador hay que desbloquear el mecanismo estirándolo hacia los puños (B).

Pliegue completamente el caminador hasta juntar los puños.

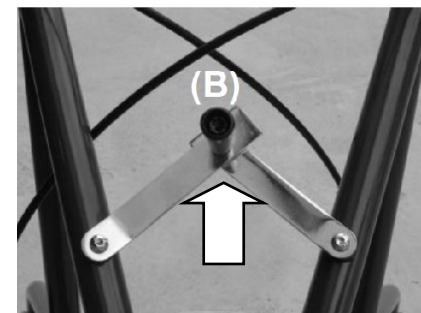

## FRENOS

El rollator está equipado con frenos autoblocantes (frenos de parking). Para frenar normalmente o reducir la marcha, simplemente apriete las palancas de freno hacia los puños.

Para bloquear los frenos (parking) empuje hacia abajo ambas palancas de freno hasta que note que quedan bloqueados. Para desbloquearlos estire de las palancas de freno hacia arriba.



Figura E