



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO AD 233



POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL CAMINADOR

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad.

Esta ayuda para caminar está fabricada en aluminio: es plegable, regulable en altura y muy ligera.

Avisos importantes de seguridad

Este caminador está diseñado para su uso en interiores, sobre un suelo plano y firme, nunca en exteriores ni suelos irregulares.

Datos técnicos

Modelo AD 233

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| - Peso 2,5 kg | - Ancho 58 cm |
| - Peso máx. 100 kg | - Altura graduable 79-91 cm |
| - Largo 45 cm | - Fabricado en aluminio |
-

Instalación y montaje

Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine el caminador en busca de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en contacto con el distribuidor donde Vd. ha adquirido el producto.

Desplegado

Sujete la empuñadura de uno de los laterales y gírelo hasta que quede a 90°. Repita la misma operación con el otro lateral hasta oír un "clic".


Asegúrese que el caminador no se puede plegar, presionando los laterales hacia dentro. El caminador sólo tiene estabilidad cuando está totalmente desplegado.

Plegado

Sujete uno de los puños y presione el pulsador central con la otra mano.

Pliegue el lateral hacia dentro, y repita la misma operación con el otro lateral.

Para su seguridad, las manos deben estar siempre en los puños acolchados cuando se maneja el caminador y también cuando se pliega.

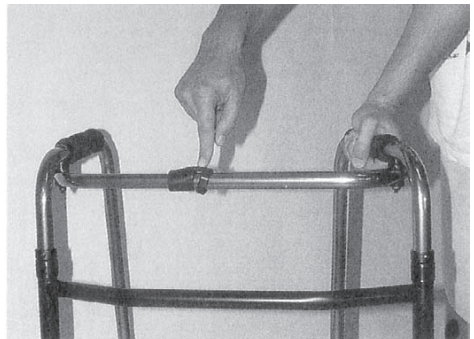


Regulación

El ajuste de altura se regula de 79 a 91cm. Presione con los dedos en los botones metálicos de las patas telescópicas. Regule las patas a la altura deseada.

Asegúrese de que los botones metálicos sobresalen de los agujeros y están totalmente encajados en su posición.

Es muy importante para la estabilidad del caminador, que las cuatro patas estén graduadas a la misma altura.

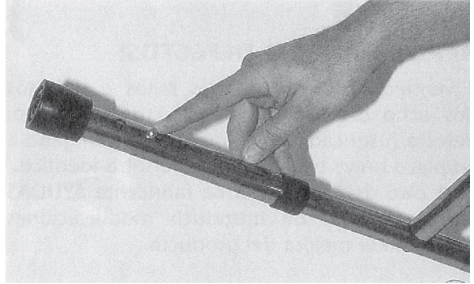

Mantenimiento

Compruebe periódicamente que el sistema de bloqueo de desplegado funciona correctamente.

Revise el desgaste de las conteras, y sustituyalas en caso de que hayan perdido el dibujo de la base.

Limpieza

No utilice detergentes abrasivos para limpiar el producto. Un paño suave y agua jabonosa tibia son normalmente suficientes para mantenerlo limpio. Tenga en cuenta secar bien el producto tras la limpieza.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com



Fabricado por:

MAXHEALTH CORPORATION
15F-6, NO.81, SEC. 1HSIN TAWURD, H SI CH IH DIST.
PO BOX 2-78, HSI CHIG, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C.

AD 233 Versión 1.0 - 2016/4