



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO AD538



DESCRIPCIÓN:

Asiento para la ducha con patas, construido con materiales inoxidables y con un recubrimiento de color blanco, en pintura de epoxi. La forma cóncava del asiento proporciona una buena estabilidad. Los orificios de desagüe, impiden que se acumule agua y suciedad en el asiento. Las 2 aperturas laterales en el asiento, a modo de asideras integradas, ofrecen una seguridad adicional al usuario.

El asiento es abatible para dejar más espacio libre en la ducha cuando no es necesaria su utilización.

INSTALACIÓN:

Solamente un profesional debe ser el encargado de instalar el asiento. Sólo una persona experta sabrá evaluar si la pared es idónea para este asiento y escoger los sistemas de fijación necesarios. Ayudas Dinámicas recomienda siempre utilizar sistemas de fijación de acero inoxidable.

Le recomendamos que en caso de duda respecto del tipo de fijaciones a utilizar, consulte a un fabricante de fijaciones. Debido a la gran variedad de tipos de construcción de paredes y a su estado de conservación, en Ayudas Dinámicas no podemos especificar el tipo de fijaciones (tortillería, tacos...) que Vd. debe utilizar en cada caso.

Antes de fijar el asiento a la pared debe adaptar la altura del asiento a la del usuario. Una vez hecho este paso, puede proceder a montarlo sobre la pared en la que lo va a instalar. Utilice todos los orificios disponibles para fijaciones del asiento. En ningún caso agrande los orificios del asiento, esto reduciría la fuerza del chasis además de invalidar la garantía.

PLEGAR Y DESPLEGAR:

Para plegar contra la pared el asiento simplemente tire del asiento hacia arriba por su borde exterior, (próximo a Vd.). El asiento deja de ser un obstáculo cuando no lo necesitamos y deja más espacio libre en la ducha.

Para bajarlo y utilizarlo, tire del asa de debajo del asiento hacia Vd. y abata el asiento hasta colocarlo horizontalmente.

No se ponga de pie sobre el asiento.

DATOS TÉCNICOS:

Asiento:50 x 30cm

Fondo total:40cm

Espacio entre

asiento y pared:10cm

Pletina de pared: 37 x 15cm

Fondo plegado:19cm

Anchura máxima:50cm

Peso:.....4,30Kg

LIMPIEZA:

Este producto debe limpiarse periódicamente para eliminar pelos y otro tipo de detritus que se puedan acumular. Se puede limpiar con cualquier detergente suave corriente y no abrasivo. Cuando sea necesaria la desinfección, proceda según los protocolos establecidos, aunque teniendo en cuenta los posibles efectos de productos químicos agresivos sobre el plástico del asiento abatible.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O DEFECTOS:

Debe Vd. informar al vendedor, quién está obligado a reparar el artículo en un plazo breve o a sustituirlo por otro idéntico. Queda excluido cualquier otro derecho.

La firma **AYUDAS DINAMICAS** se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas que sean en interés de la mejora del producto.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:
Ayudas Dinámicas
C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

