



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO TS5



1. INTRODUCCIÓN

Silla de ruedas fija con respaldo reclinable, fabricada de acero cromado de alta resistencia.

El respaldo se reclina en diferentes posiciones hasta 160°.



Lea este manual de instrucciones antes de empezar a utilizar la silla.

Este manual de usuario sirve para cualquier usuario en particular a los cuidadores como instrucciones para utilizar la silla inodoro de modo seguro.

Estas instrucciones describen la preparación, utilización, limpieza y cuidado del producto.

Para aprovechar de manera útil este producto y mantener la seguridad, lea las instrucciones de uso, conserve este manual de usuario y asegúrese que está al alcance del usuario.

2. INDICACIONES DE SEGURIDAD



Cuidado peligro de lesiones!

Al sentarse, levantarse y al mover la cubeta de inodoro puede engancharse partes de ropa o del cuerpo.

Al utilizar la silla como inodoro accione siempre los frenos.

3. DESEMBALAJE Y CONTENIDO

La silla de interior reclinable se entrega embalada en una caja en perfecto estado.



Antes de desembalarla compruebe el embalaje. Si el embalaje está dañado la silla también podría estarlo.

Si el contenido está dañado contacte con su proveedor.

Una vez desembalada deseche el embalaje en los contenedores correspondientes.

CONTENIDO

1 x silla de interior reclinable

1x respaldo

2 x reposabrazos

1 caja con dos reposapiés

1 x manual de usuario

4. MONTAJE

Una vez ha desembalado el producto y ha comprobado que el contenido esté íntegro puede proceder al montaje de la silla. Para ello siga los siguientes pasos:

Paso 1 > Respaldo. Desenrosque las palometas situadas debajo del asiento. Inserte el respaldo en los tubos traseros de la silla, coloque las palometas y apriételas hasta que el respaldo quede fijo.

Paso 2 > Reposabrazos. Inserte los reposabrazos en los orificios laterales del chasis haciendo coincidir los números (1-1, 2-2).

Paso 3 > Reposapiés. Inserte los reposapiés lateralmente en los pivotes situados en los laterales delanteros del chasis (Fig. 1). Una vez insertados gire los reposapiés 90° hasta que escuche un clic y queden fijos (Fig. 2).

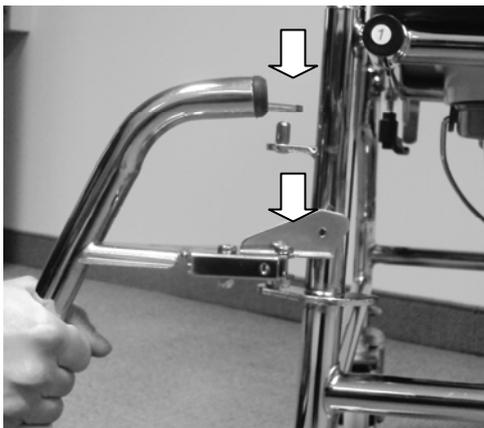


Fig. 1



Fig. 2

Una vez insertados los reposapiés enganche la cinta con velcro del reposapiernas.

5. PARTES DE LA SILLA



6. UTILIZACION



Antes de cada uso compruebe:

- que todas las partes del chasis estén bien sujetas y fijas.
- el correcto funcionamiento de los frenos.
- que las ruedas giren correctamente.

6.1 Accionar y soltar los frenos



Precaución! Peligro de caída y que las ruedas se muevan libremente!

Antes de utilizar la silla bloquee las ruedas. Para ello accione los frenos situados detrás de las ruedas traseras.

Para accionar los frenos empuje la palanca de las ruedas traseras hacia abajo.

Para soltar los frenos empuje la palanca hacia arriba.



6.2 Sentarse



Las personas con poca movilidad deben utilizar la silla solo con ayuda de cuidadores.

Para utilizar la silla como inodoro:

1. Accione los frenos
2. Extraiga la parte del asiento inodoro.
3. Para subir mejor extraiga un reposabrazos y suba una plataforma del reposapiés.
4. Extraiga la tapa de la cubeta y coloque la cubeta centrada.
5. Siéntese cómodamente.
6. Baje la plataforma del reposapiés y coloque el reposabrazos.
7. Coloque los pies en los reposapiés.

6.3 Después de utilizar extraer la cubeta



Peligro de pillarse los dedos!

No extraiga la cubeta mientras la persona esté sentada en la silla.

1. Para extraer la cubeta tire de ella hacia el lateral.
2. Coloque la tapa
3. Después de vaciar la cubeta límpiela tal y como se indica en el apartado "Limpieza".

6.4 Reclinar el respaldo



Peligro de pillarse los dedos!

Para reclinar el respaldo tire con una mano de una de las palancas situadas en la parte trasera hacia atrás (Fig. 3) Dejando la palanca accionada baje el respaldo con la otra mano.

Una vez tenga el respaldo en la inclinación deseada suelte la palanca y quedará fijo (Fig. 4).

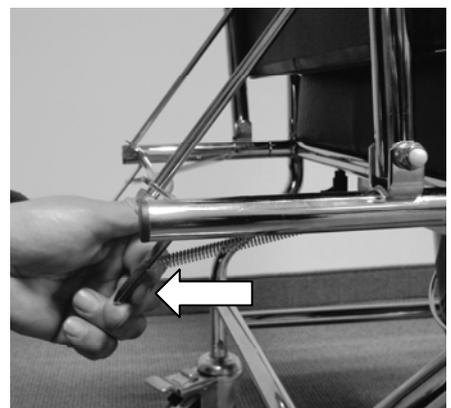


Fig 3



Fig. 4

7. LIMPIEZA



Para limpiar la silla utilice un desinfectante habitual:

Partes	Modo de limpiar	Producto
Cubeta	Enjuagar y desinfectar	Con desinfectantes habituales
Chasis, asiento y respaldo	Limpiar con un trapo húmedo	Con desinfectantes habituales

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho asiento	43cm
Altura total	100cm
Ancho total	54cm
Fondo total	91cm
Altura asiento-suelo	50cm
Fondo asiento	45cm
Alto respaldo	52cm
Peso total	19kg
Peso máximo	100kg

9 GARANTIA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/ Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com



Fabricado por:
CHAINFEATS ENTERPRISE Co. Ltd.
F8 HSIN SHENG. TAIPEI. TAIWAN