



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO PLCAB



Descripción

Este reposacabezas plegable es muy adecuado para sillas plegables ya que se adapta cuando la silla está plegada.

Se monta fácilmente en los tubos de los puños de la silla de ruedas.

Para plegarlo tire del tubo inferior del cabezal hacia abajo. Para desplegarlo empuje del tubo inferior del cabezal hacia arriba.



Para ajustar la altura del cabezal afloje el pomo situado en la barra inferior del cabezal y ajuste a la altura deseada. Una vez ajustado vuelva a apretar el pomo.

Este cabezal sólo es apto para sillas con el tubo de los puños de 22mm.

Garantía

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Importado por:

Ayudas Dinámicas

c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com

www.ayudasdinamicas.com

