



SABANA SUPERDESLIZANTE H9971

Antes de utilizar, por favor lea y familiarícese con las instrucciones. Este producto solo debe utilizarse por cuidadores.

La sabana superdeslizante es un tubo de nylon recubierto con superficies de fricción muy baja, permitiendo mover al paciente fácilmente. Está diseñado para eliminar la necesidad del cuidador de “levantar” al paciente cuando realice transferencias.

Medidas de la sabana: 120cm x 71cm.

COLOCACIÓN

1. La sabana superdeslizante H9971 ha sido diseñada para deslizar al paciente. No debe utilizarse en ningún caso para levantar el paciente.
2. Asegúrese que la superficie en la que el paciente está sentado o tumbado está fija en una posición y no se puede mover.
3. Asegúrese que la sabana superdeslizante está colocada correctamente y que la superficie deslizante está en el interior. Para comprobarlo frote la sabana entre ambas palmas de las manos antes de colocarla. Los bordes reforzados deben estar en el interior.
4. Coloque la sabana superdeslizante ya sea haciendo rodar al paciente hacia un lado o si el paciente puede ayudarle levantando las nalgas de la cama.
5. Siempre que sea posible, pida al paciente que le ayude o que se ayude.
6. Saque la sabana superdeslizante colocando una mano entre ambas capas de la sabana e inviértala sacando el borde superior más alejado por el medio de la sabana deslizante. Esto “despega” con efectividad la sabana deslizante sin crear ningún corte.
7. La sabana deslizante NO DEBE dejarse DEBAJO del paciente.
8. Regularmente compruebe la sabana deslizante de signos de desgaste.
NO LA UTILICE SI SE PRESENTA CUALQUIER SIGNO DE DETERIORO.
9. Utilice el gancho para guardar la sabana en un lugar de accesible y práctico.
10. Este producto solo debe utilizarse por cuidadores y personas adecuadas. Se recomienda que todas las personas involucradas en actividades de manejo manual reciban la formación adecuada.

CUIDADO Y LIMPIEZA

La sabana superdeslizante puede lavarse hasta 65°.

COMO UTILIZAR LA SABANA SUPERDESLIZANTE

Girar el paciente en una posición tumbada.

1. Coloque la sabana a lo ancho debajo de las caderas del paciente y los hombros. Gire al paciente en la sabana deslizante siguiendo el protocolo del manual de uso.
2. Coja la capa de arriba de la sabana superdeslizante cercana a las caderas y a los hombros del paciente (marcado con * en el diagrama a). Adopte una posición "a lo ancho" y tire de la sabana ligeramente hacia arriba y aléjela del paciente. Esto puede requerir una, dos o más cuidadores. Se recomienda considerablemente que otro cuidador se posicione en el lado opuesto.
3. Reposicione la pierna y la pierna del paciente para ayudar a girarlo (véase diagrama b), pida al paciente que le ayude siempre que sea posible. Coja la capa superior de la sabana superdeslizante y empiece la transferencia. El paciente seguirá girándose hacia el otro lado.
4. La sabana superdeslizante puede extraerse de debajo del paciente cogiendo la capa inferior cercana al hombro y cadera del paciente, sacándola con suavidad.

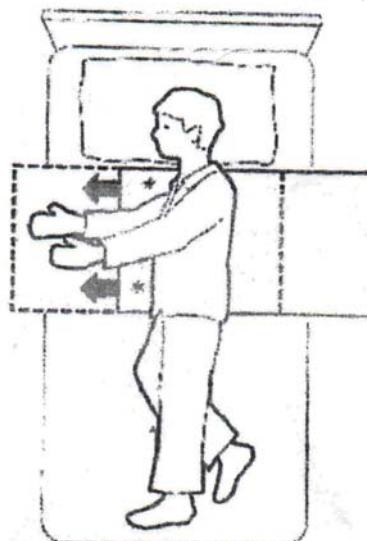


diagrama a



diagrama b


LA SABANA SUPERDESLIZANTE NO DEBE DEJARSE DEBAJO DEL PACIENTE.

Mover el paciente en la cama hacia arriba o hacia abajo

1. Haga girar el paciente hacia la sabana superdeslizante siguiendo el protocolo del actual manejo manual. Posicione la sabana superdeslizante a lo largo con el punto (a) al nivel de la cintura del paciente (diagrama c). Ayude al paciente a adoptar una posición sentada.

Nota: Si el paciente no puede sentarse, la sabana superdeslizante puede colocarse más hacia arriba para sostener la cabeza. Debe colocarse una sabana u otra capa entre el paciente y la sabana superdeslizante para ayudar a la transferencia.

diagrama c

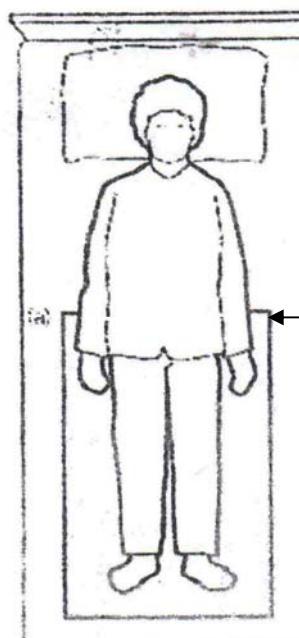


(a)

2. Utilice técnicas aprobadas para mover el paciente hacia arriba de la cama.

Si es necesario, coja la capa superior de la sabana superdeslizante y tire de ella al mismo tiempo.

Deslícela suavemente. NO LA LEVANTE.

Cuando mueva al paciente hacia arriba, asegúrese que sus talones estén en la sabana superdeslizante, o utilice una sabana deslizante adicional más pequeña para prevenir que los talones se arrastren (diagrama d).

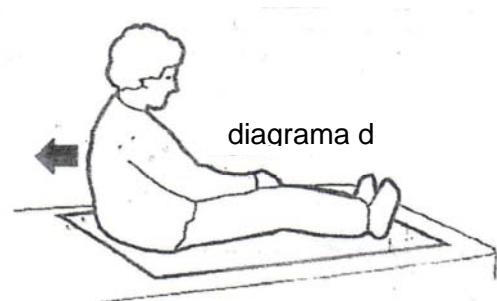

3. Cuando el paciente está en la posición deseada, saque la sabana superdeslizante tirando de ella suavemente. Asegúrese que el paciente no se mueve hacia abajo de la cama otra vez.

LA SABANA SUPERDESLIZANTE NO DEBE DEJARSE DEBAJO DEL PACIENTE.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:
Ayudas Dinámicas

C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

