

MANTENIMIENTO

- Compruebe el estado del eje de giro y el funcionamiento de la palanca de desbloqueo y posición.
- Compruebe que no presenta ningún desperfecto o daño en ninguna de sus partes.

Si detecta algún desperfecto, no lo utilice y póngase en contacto con el distribuidor que Vd. ha adquirido el producto.

LIMPEZA

- Limpiar con agua y detergente suave, no abrasivo.
- Se puede desinfectar con una solución de alcohol.

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmante el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

GARANTÍA

La garantía se extiende según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com - www.ayudasdinamicas.com



AyudasDinámicas

MANUAL DE USUARIO



ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA (AD536-I)

INTRODUCCIÓN

La prevención de caídas es uno de los aspectos más importantes de la higiene, los asientos giratorios son una solución práctica y económica para aquellas personas que experimentan inseguridad o dificultad al utilizar una bañera. Diseñados para utilizarlos con la ayuda de otra persona que con un mínimo de esfuerzo introducirá las piernas del usuario dentro de la bañera. No requiere obras ni mantenimiento y se puede retirar para dejar libre la bañera.

DATOS TÉCNICOS

De construcción robusta, fabricado en acero inoxidable y recubrimiento epoxi en color blanco, no requiere mantenimiento y se puede separar en dos piezas para facilitar su almacén o transporte. El asiento queda emplazado firmemente en la bañera, sin requerir obras ni fijaciones y se puede retirar al instante para usar la bañera normalmente. La seguridad del asiento es muy importante, lleva reposabrazos integrados y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento para mayor seguridad al entrar y salir. El asiento del diseño impide deslizamientos y evacua el agua. Dos tornillos acolchados, aseguran el asiento en el interior de la bañera. El asiento de plástico de alta resistencia, es biocompatible y fácil de limpiar.

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad más adelante a Vd. o para próximos usuarios.

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No utilizar si detecta que está en malas condiciones.
- Asegúrese del estado del eje de giro (que no tenga holgura) y la palanca de desbloqueo y posición (situada debajo el asiento).
- Si utiliza la silla con la persona completamente desnuda debe colocar una toalla en el asiento.
- No exceda el peso máximo de usuario o el peso máximo de carga indicado en la etiqueta del producto.
- Asegúrese que este producto se adapta a las características y condición física del usuario.

MONTAJE


Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine la silla en busca de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en contacto con el distribuidor que Vd. ha adquirido el producto.

Instrucciones de montaje

Coloque la base del asiento sobre la bañera de manera que las cuatro patas reposen sobre los bordes de la misma. Gire los pomos de los tornillos laterales hasta que queden a unos milímetros de distancia de las paredes de la bañera. No es en absoluto necesario que estos tornillos estén presionando las paredes interiores de la bañera.

Coloque el asiento sobre la base del producto. El cilindro de la base le servirá de guía a este efecto.

Pruebe la palanca de freno y compruebe que actúa correctamente. El asiento puede ahora girar 360 grados.

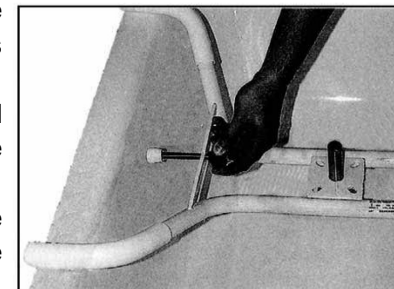

INSTRUCCIONES DE USO

1. El usuario se sienta en el asiento que queda bloqueado (cada 90°). Los brazos pueden ser una ayuda adicional.
2. El cuidador solo tiene que soportar el peso de las piernas y girar el asiento cómodamente dentro de la bañera.
3. Ahora la persona está cómodamente sentada y segura en el interior de la bañera.

