



Ayudas Dinámicas

**MANUAL DE USUARIO
CAMINADOR INFANTIL HOPLA**



CAMINADOR INFANTIL "HOPLA"

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. INFORMACIÓN	4
3. MONTAJE Y DESMONTAJE	5
4. ACCESORIOS	6
5. CARACTERÍSTICAS	10
5. MANTENIMIENTO	11
6. GARANTÍA	12

CAMINADOR INFANTIL “HOPLA”

1. INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por adquirir su nuevo caminador infantil “Hopla” de Ayudas Dinámicas®.

Nos complace proporcionarle productos seguros y confortables. Nuestro objetivo es asegurar su completa satisfacción. Esperamos sinceramente que disfruten de su nuevo caminador infantil “Hopla” de Ayudas Dinámicas®.

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar su caminador infantil.

Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados de su caminador de niños.

Si tiene alguna consulta o precisa de información adicional, contacte con su distribuidor.

2. INFORMACIÓN

El caminador perfecto para el aprendizaje. “Hopla” ha sido diseñado para niños que necesitan una ayuda para su movilidad durante su crecimiento y desarrollo. Con este caminador, él o ella pueden encontrar su propia posición idónea para desarrollar una pauta de control postural.

Estos símbolos pueden aparecer en su manual y producto “Hopla” y sirven para identificar advertencias, acciones obligatorias o prohibidas. Asegúrese de que los ha leído y comprendido perfectamente.



¡ADVERTENCIA! Indica una situación o circunstancia potencialmente peligrosa. De no seguir los procedimientos indicados, podría provocar en usted o en terceros lesiones físicas y daños o averías en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo negro en un triángulo amarillo con borde negro.



¡OBLIGATORIO! Pasos que deben realizarse tal y como se indica. De no realizar las acciones obligatorias, podría sufrir lesiones personales o daños en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo blanco sobre un círculo azul con borde blanco.




¡PROHIBIDO! Estas acciones están prohibidas, cualquiera que sea el tiempo o las circunstancias. La realización de acciones prohibidas puede provocar lesiones personales o daños en el material. En el producto, este icono tiene forma de símbolo negro con un círculo y una raya rojos.

NOTA: El presente manual de instrucciones recoge las últimas especificaciones e informaciones disponibles en el momento de su publicación. El fabricante se reserva el derecho a aportar modificaciones en caso necesario. Cualquier modificación en nuestros productos puede provocar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones de esta guía y el producto que ha comprado.

CAMINADOR INFANTIL “HOPLA”

3. MONTAJE Y DESMONTAJE

Acople a la altura deseada la rueda delantera con la llave suministrada (véase figura 1). La sección curvada del tubo es la que debe mirar hacia adelante. Las ruedas delantera y trasera deben estar posicionadas a la misma altura. No extienda el tubo más allá de la marca roja. El aro de soporte del tronco se acoplado en la parte delantera de la estructura (véase figura 2). Ajústelo con el tornillo circular de plástico.

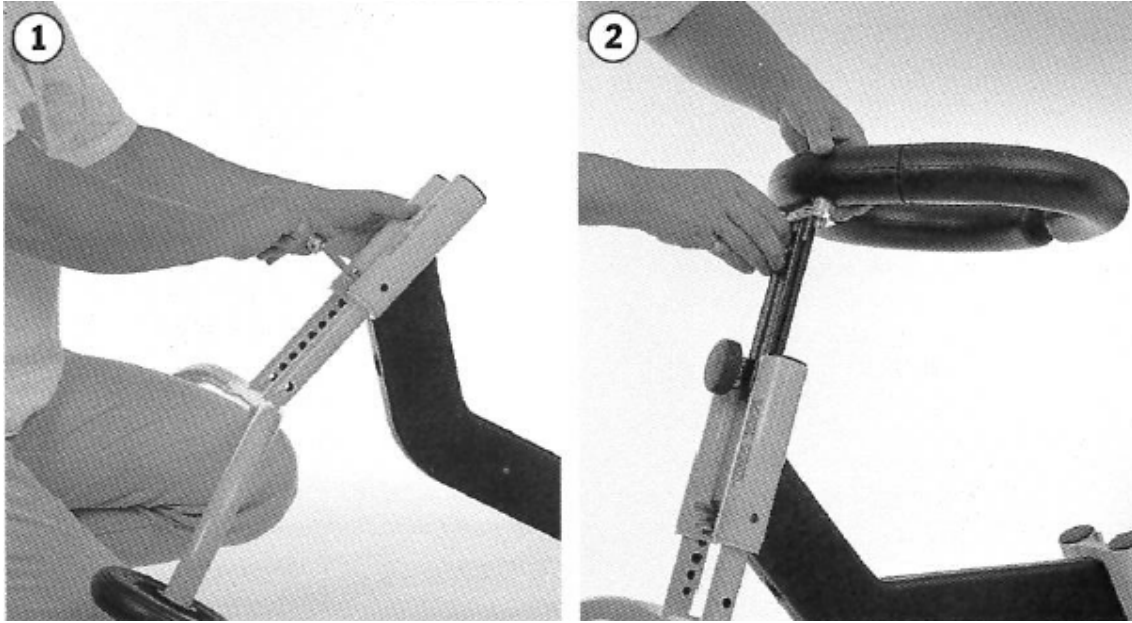



Su caminador infantil “Hopla” está ahora montado en su forma básica.

4. ACCESORIOS

ASIDERAS/BARRA DE SEGURIDAD

Las asideras ofrecen a los niños una postura más erguida y la posibilidad de conducir su "Hopla" con comodidad.



Acople las asideras al aro de soporte del tronco (véase figura 3). Primero deberá desatornillar el pequeño tornillo. El ángulo es ajustable mediante la palanca del lado izquierdo (véase figura 4).

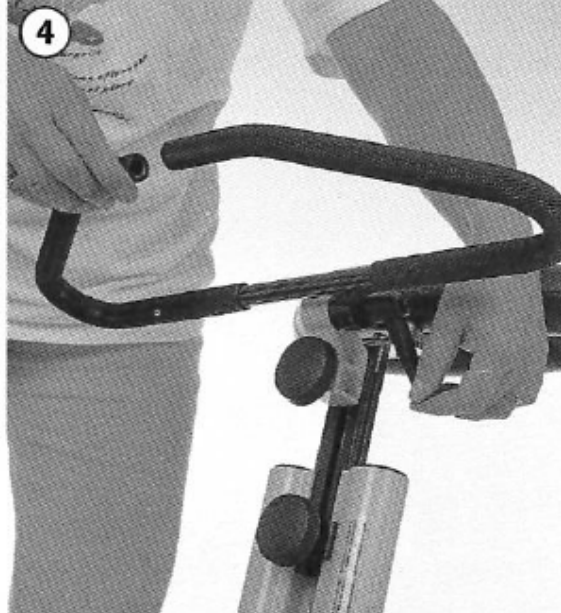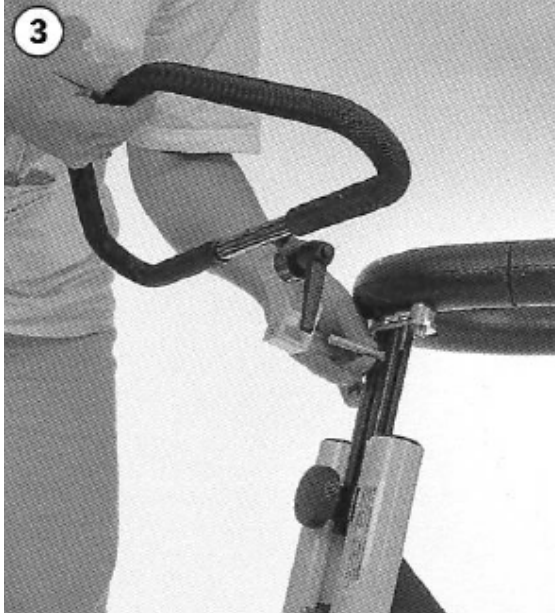

SILLÍN/ASIENTO

Elija el sillín o asiento más adecuado entre el standard o el de forma de banana, para desarrollar su propio patrón de la marcha.

Ponga el asiento en la barra de metal y fíjelo con el tornillo fijador (Véase figura 5). Encaje el soporte en la estructura, ajústelo a la altura deseada y fíjelo con el tornillo (véase figura 6).

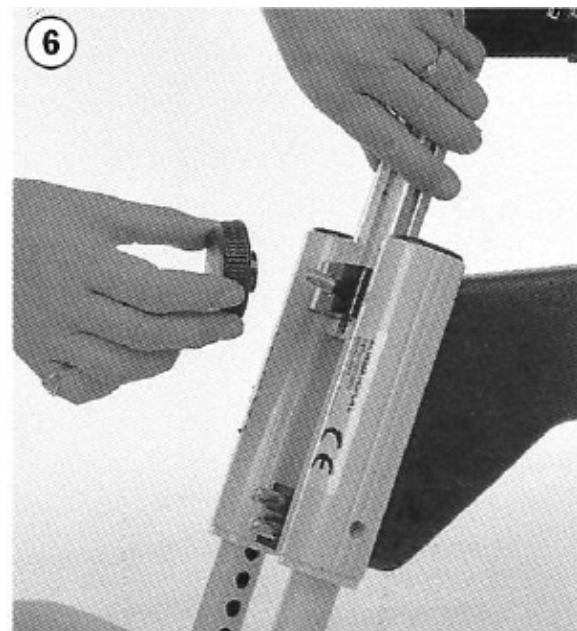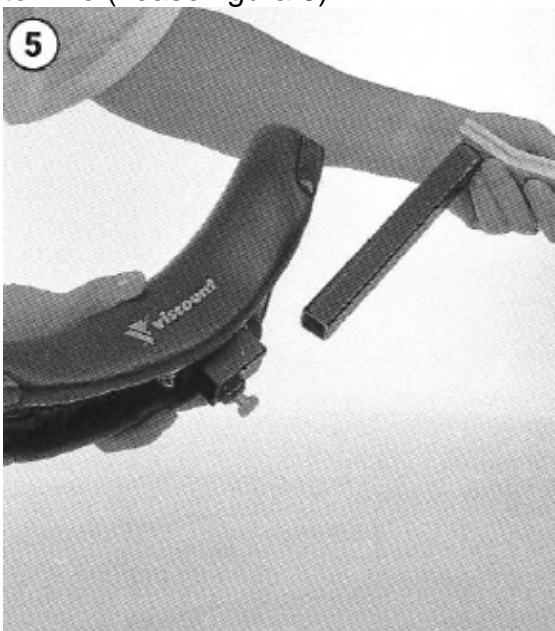



CAMINADOR INFANTIL “HOPLA”

SOPORTE TRASERO

El apoyo para la espalda ayuda estabilizar las caderas o pelvis y evitar el deslizamiento hacia atrás o de lado a lado.

Ajuste el tornillo en la parte trasera de la estructura por encima del soporte del asiento (véase figura 7). Ajústelo a la altura deseada y luego apriete el tornillo.


El sillín se puede angular mediante la palanca del lado derecho (véase figura 8).

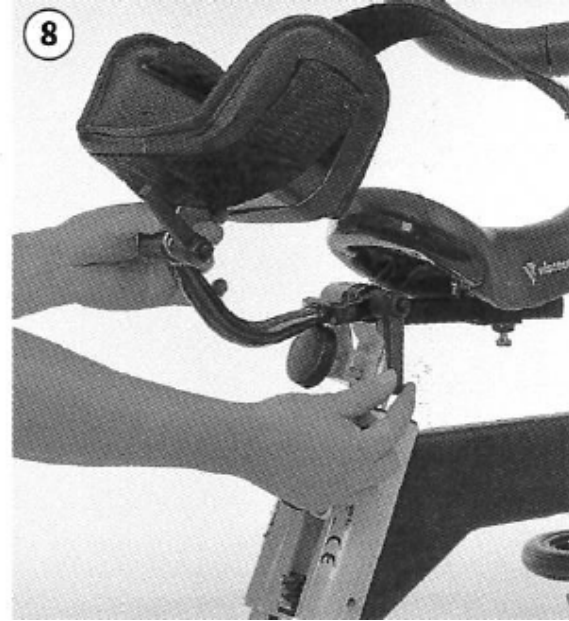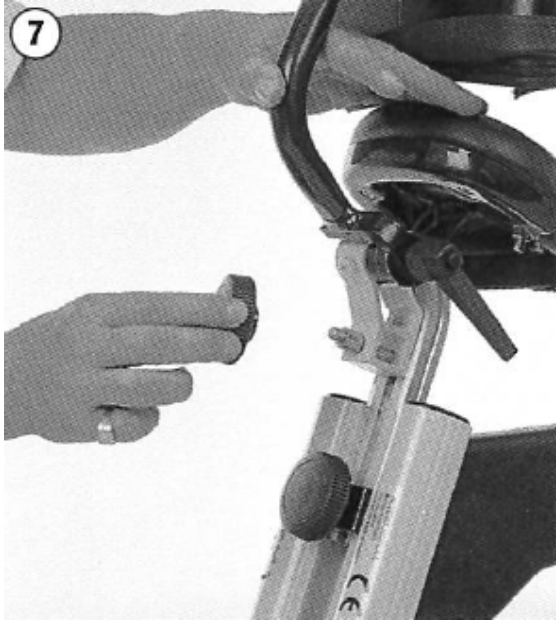

SOPORTE DE TRONCO

El soporte del tronco le ayudará a tener un mejor control y mantener una posición erguida, disponible en dos tamaños.

El soporte de tronco se coloca en el hueco correspondiente en la parte frontal de la estructura. El ángulo y la profundidad del mismo es ajustable mediante una palanca en el lado derecho (véase figura 9).

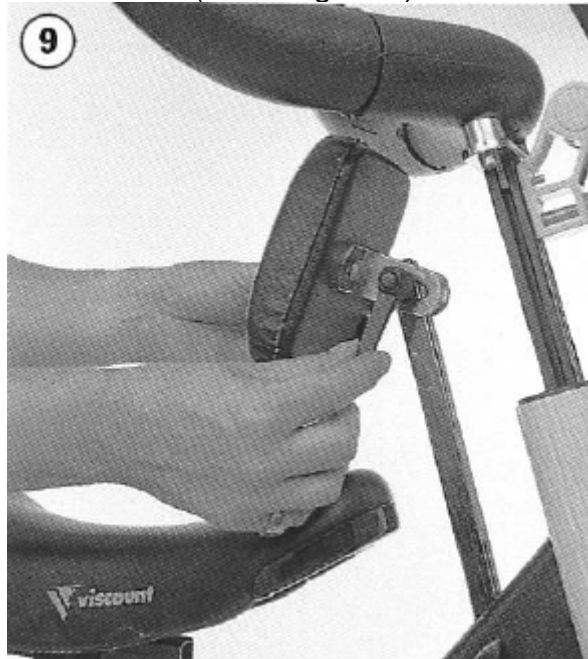


CAMINADOR INFANTIL “HOPLA”


SEPARADOR DE PIERNAS

Es un complemento ideal para evitar que se crucen las piernas en la marcha del niño.

Las barras de metal son atornilladas en los agujeros de debajo de la estructura (véase figura 10).

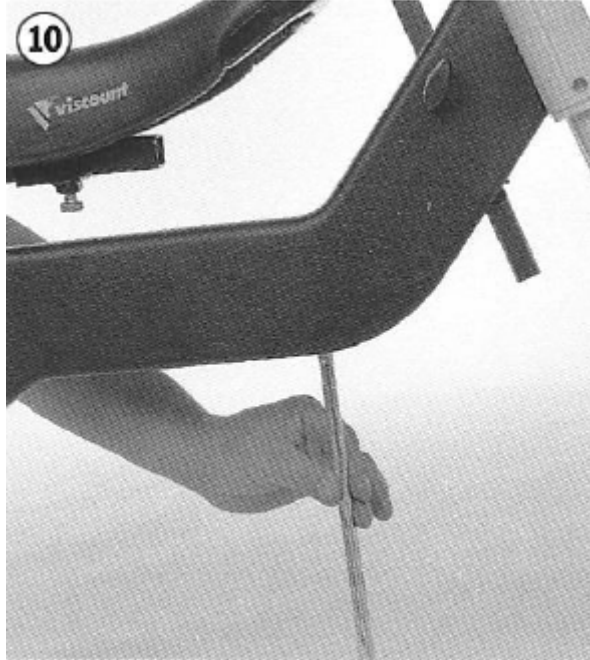

La junta de plástico se acopla con la parte redondeada hacia adelante y se fija mediante los tornillos Allen (véase figura 11).

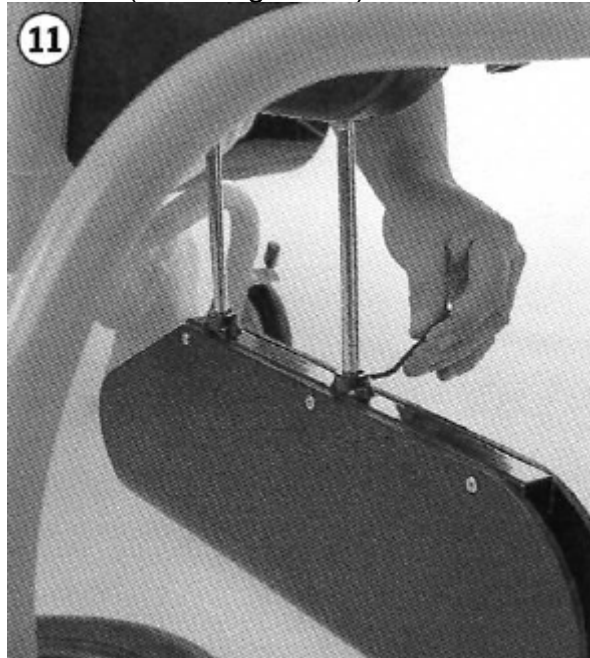

CAMINADOR INFANTIL “HOPLA”

MANETA PARA EMPUJAR

La maneta de empuje es útil para controlar la velocidad de marcha. Afloje el tornillo completamente. El soporte está situado alrededor de la estructura (véase figura 12). Vuelva a apretar el tornillo fuertemente.



CAMINADOR INFANTIL "HOPLA"

5. CARACTERÍSTICAS

CAMINADOR HOPLA	Modelo	
	AD247S	AD247G
Altura al sillín	35-52cm (S, pequeño)	45-62cm (L, grande)
Altura máxima del usuario	110cm (S, pequeño)	135cm (L, grande)
Peso máximo soportado	35kg	



6. MANTENIMIENTO



¡ADVERTENCIA! Tenga en cuenta que su caminador Hopla está diseñado para uso en interiores.



¡ADVERTENCIA! Nunca deje a niños usar su caminador Hopla sin vigilancia.

Una revisión profunda de su caminador Hopla debería ser realizada por personal especializado dos veces al año.

Una revisión general de su silla debería ser realizada mensualmente

Limpie la estructura con un trapo suave y jabón tipo champú.

Lubrique las ruedas con grasa

NOTA: Utilice sólo piezas del fabricante para todas las reparaciones y reemplazos.

MODIFICACIONES

Usted no debe modificar, añadir, quitar o deshabilitar cualquier característica, parte o función de silla. Las modificaciones no autorizadas pueden provocar lesiones personales y / o daños en el producto y anular también su garantía.

7. GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Si no sigue las instrucciones, advertencias y notas del manual de utilización, podría ocasionar lesiones físicas a usted o a terceros o daños en el producto, además de anular la garantía del mismo.

CAMINADOR INFANTIL "HOPLA"



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

