



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO AD537P



DESCRIPCIÓN

Práctico taburete plegable para el baño, fabricado en aluminio, es muy ligero y totalmente inoxidable. La forma cóncava del asiento proporciona una buena estabilidad. Los orificios de desagüe, impiden que se acumule agua y suciedad en el asiento. Las 2 aperturas laterales en el asiento, a modo de asideras integradas, ofrecen una seguridad adicional al usuario.

Las patas son telescópicas de altura graduable y las conteras son antideslizantes de caucho.

El asiento se pliega para poder guardarlo cuando no es necesaria su utilización.

PLEGAR Y DESPLEGAR

Para plegar el taburete coja con una mano la barra transversal de las patas delanteras y empújela hacia atrás, con la otra mano coja la parte delantera indicada por una flecha y empújela hacia arriba. (Fig. 1)

Para desplegar el taburete, cójalo por el asiento y levántelo. Abra las patas del taburete y encaje la barra transversal de las patas delanteras en la parte delantera del asiento. (Fig. 2)

Nunca se ponga de pie sobre el asiento ya que podría caer.



Fig. 1

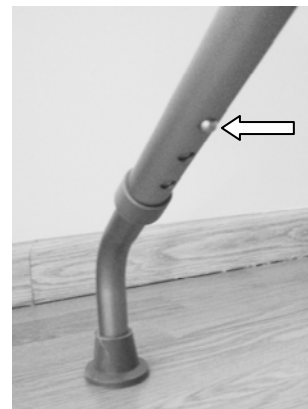


Fig. 2

REGULACIÓN PATAS

Las patas del taburete son graduables en altura para ajustarse al usuario. Para regular las patas simplemente presione el pivote hacia dentro, luego mueva la pata a la altura deseada. Una vez tenga la altura deseada encaje el pivote hasta que oiga un “clic”.

Asegúrese que las cuatro patas están reguladas a la misma altura.



DATOS TÉCNICOS

Ancho:	52cm
Alto:	37-40cm
Fondo:	46-50cm
Ancho asiento:	47cm
Fondo asiento:	30cm
Altura asiento:	37-40cm
Peso:	2,3Kg
Peso máx.:	80kg

LIMPIEZA

Este producto debe limpiarse periódicamente para eliminar pelos y otro tipo de detritus que se puedan acumular. Se puede limpiar con cualquier detergente suave corriente y no abrasivo. Cuando sea necesaria la desinfección, proceda según los protocolos establecidos, aunque teniendo en cuenta los posibles efectos de productos químicos agresivos sobre el plástico del asiento abatible.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O DEFECTOS

Debe Vd. informar al vendedor, quién está obligado a reparar el artículo en un plazo breve o a sustituirlo por otro idéntico. Queda excluido cualquier otro derecho.

La firma **AYUDAS DINAMICAS** se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas que sean en interés de la mejora del producto.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:
Ayudas Dinámicas
C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

