



# Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO

AD688



## **POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA MESITA**

Características técnicas:

Tablero: 60 x 40cm

Altura regulable: de 61 a 94cm

Ruedas: 4 (2 con freno - 2 sin freno)

Peso: 9kg

### **Descripción y montaje**

Esta mesita graduable en altura viene plegada en una caja y totalmente montada exceptuando las dos ruedas delanteras que deberá atornillar.

El tablero bascula hasta 90° en ambos sentidos y la mesa se pliega quedando plana para guardarla o transportarla. El mástil también es basculante hasta 80° para acercarlo mas al usuario si es preciso.



### **Recomendaciones**

- Antes de colocar cualquier objeto encima de la mesita, asegúrese que esta sobre suelo plano y es estable y que todos los pomos están apretados.
- No se apoye sobre la mesita, podría volcarla.
- El tablero no aguanta más de 10kg de peso.

### **Limpieza**

No moje o vierta líquidos sobre el tablero, la madera podría deformarse con la humedad.

Limpie regularmente la mesita con un trapo húmedo y séquela a continuación. Utilice detergentes suaves para limpiar la mesita.

### **Garantía**

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:  
**Ayudas Dinámicas**  
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75  
[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)  
[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

