



# Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO

AD557



## DESCRIPCIÓN

Esta tabla especialmente bien dimensionada y extraplana para facilitar el máximo posible el acceso en el caso de transferencia lateral.

La superficie de la tabla tiene un ligero relieve antideslizante que hace que la tabla sea más segura.

Incluye 4 soportes regulables para ajustar la tabla por debajo a la anchura exacta de la bañera.

## COLOCACIÓN Y AJUSTES

Para colocar la tabla en la bañera simplemente debe colocarla encima de la bañera. Una vez colocada debe ajustar los soportes situados debajo de la tabla a la anchura de la bañera.

Fije la tabla sin apretar demasiado los soportes hacia las paredes de la bañera ya que podrían dañar la tabla.



## MEDIDAS

Largo	72cm
Fondo	29cm
Peso máx.	130kg

## GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Importado por:

**Ayudas Dinámicas**

C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA

tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75

[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)

[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)





# Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO

AD557



## DESCRIPCIÓN

Esta tabla especialmente bien dimensionada y extraplana para facilitar el máximo posible el acceso en el caso de transferencia lateral.

La superficie de la tabla tiene un ligero relieve antideslizante que hace que la tabla sea más segura.

Incluye 4 soportes regulables para ajustar la tabla por debajo a la anchura exacta de la bañera.

## COLOCACIÓN Y AJUSTES

Para colocar la tabla en la bañera simplemente debe colocarla encima de la bañera. Una vez colocada debe ajustar los soportes situados debajo de la tabla a la anchura de la bañera.

Fije la tabla sin apretar demasiado los soportes hacia las paredes de la bañera ya que podrían dañar la tabla.



## MEDIDAS

Largo	72cm
Fondo	29cm
Peso máx.	130kg

## GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Importado por:

**Ayudas Dinámicas**

C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75

[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)

[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

